

機械器具(01)手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN 70469000

スパイダー2 の付属品 (スイッチドレープ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

【使用方法】


- ・ 再使用禁止
- ・ 本品は専用に設計されている。他の製品に流用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下の構成品に該当する。製品名、カタログ番号、サイズ等については直接の容器・被包に記載している。

- ・ スwitchドレープ

1. 形状

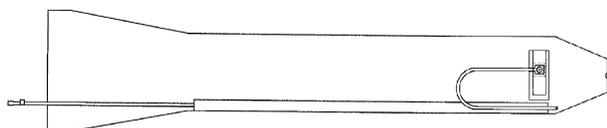

2. 外観(スパイダー2・リム・ポジショナーに取り付けた状態)



3. 原理

本品は、「スパイダー2・リム・ポジショナー」と共に使用する延長コード付きの滅菌ドレープである。

【使用目的又は効果】

手術台アクセサリの付属品(延長コード付滅菌ドレープ)

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であるため、1回限りの使用とし、再使用しないこと。

【使用方法】

- (1) スパイダー2・リム・ポジショナーを手術台に取り付け、準備する。
- (2) 本品を無菌的に開封して、スパイダー2・リム・ポジショナーに被せ、ドレープクリップで抑える。
- (3) 本品の延長コードの端子をスパイダー2・リム・ポジショナーのスイッチドレープコネクタに接続する。
- (4) スパイダー2・リム・ポジショナーのセッティングを進め、必要なら延長コードの先端にあるボタンの位置を変更する。

重要事項:

- スイッチドレープを接続している場合、スパイダー2・リム・ポジショナーのセットアップボタンは機能しない。
- (5) スパイダー2・リム・ポジショナーが起動してジョイントがロックされている場合、本品のボタンを押すことで一時的にスパイダー2・リム・ポジショナーの位置変更ができるようになる。ボタンを放すと、再び全てのジョイントがロックされる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 専門医の監視指導下でのみ使用すること。
- (2) 本品は滅菌済製品であり、開封は使用前に包装が破損していないか確認を行うと同時に、無菌的に取り扱うこと。破損がある場合は使用しないこと。
- (3) 本品はディスポーザブルのため一症例限りの使用で再滅菌・再使用はしないこと。
- (4) 開封後未使用のものを再滅菌して使用しないこと。使用しなかった場合でも廃棄すること。
- (5) 使用前に滅菌包装に記載されている使用期限を必ず確認すること。
- (6) 使用前に、破損箇所が無いのか、また適切に機能するかを確認すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (7) 【使用目的又は効果】欄の記載内容以外の用途で使用しないこと。
- (8) 破損等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。使用後は、直ちに破損がなかったかを点検すること。
- (9) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。本品は経験豊富な専門医の指導のもとで使用すること。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- (1) 不具合
 - ・ 製品の破損
- (2) 有害事象
 - ・ 感染
 - ・ 機器の汚染

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保管すること。

【使用期間】

- ・ 使用期限は外箱に表示してある(自己認証による)。

取扱説明書を必ずご参照ください。

S-G026b-002
BC:10408

***【主要文献及び文献請求先】**

スミス・アンド・ネフュー株式会社
マーケティング部
電話番号:03-5403-8671

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

(製造販売業者)
スミス・アンド・ネフュー株式会社
電話番号:03-5403-8671