

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 医療用不織布 (JMDN コード:34655000)

メロリン Home care

再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止(一度使用したものを再使用しないでください。)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、コットン/ポリエステル繊維を多数の穴があいたポリエステルフィルムとポリエステル不織布ではさみこんだ三層構造のくつつきにくい被覆（ひふく）・保護材です。

2. 機能及び動作原理

キズを被覆することにより、キズから出る液を吸収し、キズを保護します。

キズにあてる面は、多数の穴があいたフィルム層で、キズから出る液を素早く透過させるとともに、キズへのくつつきを防ぎます。キズから出る液は吸収層に保持され、漏れにくく、さらに外表面ははっ水処理されています。

サイズ・包装

製品番号	サイズ(cm)	枚/箱
33000162	5.0×5.0	5
33000163	10.0×10.0	3

【使用目的又は効果】

本品は、擦り傷や裂けた傷、軽度の火傷などの傷を処置するために用いる、不織布から成る被覆・保護材です。傷への固着を防ぐために、傷との接触面に多孔性ポリエステルフィルムを用いています。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 貼る前

キズ及びその周辺を生理食塩水、水道水等で洗浄し、十分に清潔にしたのち乾燥させてください。

2. 貼り方

- キズの大きさに適したサイズを選択してください。
- つつつした透明なフィルム面をキズにあててください。
- 医療用テープ、医療用フィルム等で固定してください。

3. 交換及び交換頻度

キズの状態に応じ、一日に一回以上交換してください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 貼る際は、必ずつつつしたフィルム面をキズ・適用部にあててください。間違って外表面をあてると、はっ水処理をしてあるためキズから出る液が吸収されず、皮膚がふやけたり、感染等の原因となることがあります。
- 交換時、本品がキズにくっついているときは、生理食塩水または水道水でくっついた部分を湿らせ柔らかくしてから剥がしてください。くっついたまま無理に剥がすと治りかけのキズ等を損傷することがあります。
- 本品は滅菌済みですので開封後は速やかに使用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・痛み等が生じた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 本品の使用により、改善が見られない場合または悪化する場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 重症のキズ（筋、骨、腱が見えるような深いキズ、膿んで腫れて

いるキズ）、重症のやけど等は、専門医にご相談ください。

2. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下の有害事象が発生する場合があります。

一般的な創傷被覆（ひふく）・保護材の使用における有害事象

- キズの感染症状
- キズ及び周囲の皮膚障害（皮膚がはがれる、ふやける、むくむ、水ぶくれができる、赤くなる、ただれる、かゆくなる、アレルギー反応、かぶれる）
- 固着（くつつき）
- 壊死（死滅した）組織の増加
- 疼痛

3. その他の注意

- 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されていますが、使用時に包装が開封、破損または水濡れ及び汚損している場合には使用しないでください。
- 万が一、個包装内の製品に不良が見られた場合には使用しないでください。
- コットン内部に黒色の斑点状のものがみつかることがあります。が、綿花の実殻であるため使用上支障はありません。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管方法：水濡れに注意してください。
高温多湿、直射日光および、火気を避けて、25℃以下で保管してください。
- 有効期間：製造日より5年間〔自己認証（当社データ）による〕
- 使用期限：製品包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

スミス・アンド・ネフュー株式会社

TEL：03-5403-8930