

**2023 年 7 月改訂（第 3 版）
*2019 年 9 月改訂（第 2 版）
2019 年 3 月作成（第 1 版）

届出番号：26B3X10015001311

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう JMDN70897020

SNOW ROCK デンタルストーンIMP

【形状、構造及び原理等】


主成分：半水石こう、その他
形状：粉末状
色調の違いにより、イエロー、スカイブルー、ホワイトの
3 色がある。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こう。

*【使用方法等】

- ①本品 100g に対し、水 23～24mL の比率で練和する。
- ②練和は 30～60 秒間均一になるまで行います。
- ③歯科用バイブレーターで振動を与えながら、印象に注入します。
練和後約 3 分間はバイブレーターによる流動性がある状態となります。
練和後約 2 分後には盛り上げが可能な流動性に変化します。
操作時間は約 7 分です。
- ④注入後、約 23～25 分で完全に硬化します。

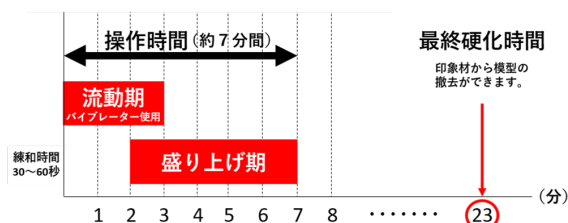

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ②本品の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
 - ③本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。
 - ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、高温・多湿の場所を避け、換気の良い場所で保管すること。
- ・開封したまま放置すると吸湿し、変質する恐れがある。
- ・開封後は十分に密閉するか、密封できる容器に移して保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

- ・包装上部又は包装ラベル上に記載されている 6 桁の数字は LOT 及び製造日を示す。製造日より 2 年までに使用すること。（使用期限は製造所データによる。）
（※例 YY MM DD は、製造日 20YY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：スノーロックジャパン株式会社
住 所：〒614-8142
京都府八幡市下奈良南頭 14-3
電 話 番 号：075-972-2020
F A X 番 号：075-972-2010

**外国製造所：Mungyo Corporation

ムンギョウ コーポレーション
国 名：大韓民国