

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

シリコンパッド

【形状・構造及び原理等】

本品はシリコンゴム製のセメント等の練和に用いるパッドで
種々の色がある。

【使用目的又は効果】

各種セメント等を練和するために用いる。

【使用方法等】

本品上にセメント等を取り出し、練和する。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

1. 本品を滅菌する場合は次の方法で行うこと。
 - ・オートクレーブ滅菌 132℃ 15 分間
 - ・ケミクレーブ滅菌 132℃ 20 分間

【使用上の注意】

その他の注意

1. 酸化亜鉛ユージノール系セメント材を練和後、レジンセメント
を練和すると硬化が阻害されることがある。
2. シリコン系の印象材とは融着するので使用しないこと。
3. 鋭利なスパチュラは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）