

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

ペンタ ミキシングチップ レッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は印象材の自動練和器に接続するプラスチック製のチップです。

【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和するのに用いる。

【使用方法等】

1. ペンタミックス 3 等のベースとカタリストをカートリッジにセットしてペンタミックス 3 等に装填し、本品を取り付けます。ペンタミックス 3 等の自動練和により本品をつうじて練和されたペーストが得られます。
2. 使用後の本品はキャップとして次回使用時までカートリッジにつけたままにしておきます。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

- 1) 使用する印象材とペンタミックス 3 等の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。
- 2) しばらく使用しない場合は、チップの入口付近のベース又はカタリスト ペーストが硬化している場合があるので、チップをつけずに試し出しをして確認すること。また、硬化したペーストは探針等で除去すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルペンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）