

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDN コード：34864000

インジェクション バンソウコウ

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

感染の徴候（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を受けてください。[皮膚障害の恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 一度開封して、そのままにしておいた本品を使用することはいけません。また、一度開封したものを再滅菌して使用することはいけません。[製品の清潔が保たれないため。]
2. 感染の徴候（発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）がある場合に本品は使用しないでください。[使用した場合、傷の悪化、感染の悪化、治癒の遅延につながる恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

本品は天然ゴム成分を含まないアクリル系粘着剤が塗布された不織布基材と非固着性パッドからできています。

人体に接触する部分の組成：
アクリル系粘着剤（基材部）
ポリエチレンフィルム／不織布（パッド部）

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

1. 準備
 - 1) 本品が良く粘着するよう、体毛が特に多い場合など必要に応じて適用部位を医療用クリッパーやはさみなどを使用し、除毛をしてください。この時、かみそりなどで毛を剃ることはしないでください。[皮膚を傷つけることがあるため]
 - 2) 傷およびその周囲を適宜洗浄・消毒してください。
 - 3) 良好な粘着と皮膚障害の防止のため、薬液等は完全に乾燥させてから貼付してください。
 - 4) 本品の滅菌包装が破損していないことを確認し、開封後は直ちに使用してください。
2. 使用方法
 - 1) 開封し滅菌済の本品を取り出してください。
 - 2) ページ色のテープを端部より台紙からはがしてください。
 - 3) 穿刺部等の傷にパッドをあて、粘着面を貼付し、そのまま粘着部を押さえてしっかり固定してください。
3. 除去（剥離）方法
 - 1) 使用後はすみやかに本品を除去してください。
 - 2) 本品の端を丁寧につかみ、皮膚への負担を軽くするために、皮膚が持ち上がらないように押さえ、毛の流れに沿って折り返しながらかゆ々と剥がしてください。
 - 3) 本品が創面に固着してしまった場合は、水を浸してゆくと剥がしてください。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

- ・貼付前に傷およびその周囲の皮膚を洗浄・消毒などによって清潔にしてください。
- ・本品を貼付する皮膚は十分に乾かしてください。
- ・粘着力が低下し、剥がれる可能性があるため軟膏やクリームなどを塗布した皮膚に本品を貼らないでください。必要な場合は、医

師にご相談ください。

- ・浸出液の多い傷には貼らないでください。
- ・適切なサイズを選択してください。
- ・本品のパッド部分が傷を被覆できるように貼付してください。
- ・引っ張って伸ばした状態で貼付すると皮膚障害や剥がれの原因となることがあるため注意してください。
- ・貼付前に適用部位の止血を行ってください。
- ・本品を扱うときには手を清潔にし、手袋を着用するなど、粘着面を汚染しないようにしてください。[汚染した本品を傷に貼付すると感染する恐れがあるため]
- ・適用部位は感染症やその他の合併症の徴候があるかどうかを確認するためによく観察してください。感染の徴候（発赤、膿の浸出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けてください。
- ・一度開封または、使用した本品を再滅菌して使用しないでください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品使用にあたり、本添付文書をよくお読みの上、医師または看護師の指示にしたがって、ご使用ください。
 - 2) 医師に相談の際にはこの添付文書をお持ちください。
 - 3) 粘着製品により皮膚障害を起こしやすい方は必ず事前に医師にご相談ください。
 - 4) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状（発赤、発疹、痒み、水疱、腫れ、表皮の剥離など）が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けてください。
 - 5) 貼付部に粘着剤による発赤や浸出液等の貯留による浸軟（ふやけ）を起こす場合があります。また、表皮剥離を起こす場合もあるので、本品の使用時には十分な観察を行い、異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けてください。
2. その他の注意
 - 1) 本品は開封後、直ちに使用してください。
 - 2) 本品使用後は、各自治体の定めた方法で廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温・多湿を避けて保管。
2. 有効期間
使用の期限：個包装及び外箱に記載。[自己認証（製造元データによる）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルペンタムイノベーション株式会社
TEL：0570-000-470（カスタマーコールセンター）