


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズ用 混和皿

【形状・構造及び原理等】

1. 原理：本品は、歯科治療時に、適量の接着材を一時的に貯留するための窪み（ウェル）をもち、遮光のための蓋、歯科用ブラシ置きを有している。
2. 形状：下図に示す。

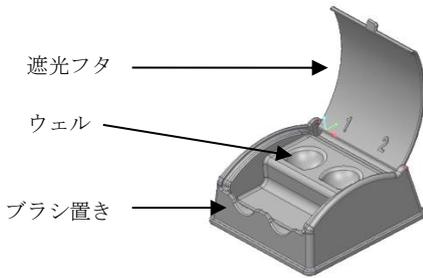

3. 原材料：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

歯科用の接着材などの歯科材料を容器から取り出し、患者へ適用するまで一時的に貯留するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用する接着材などの歯科材料を、手順に従いウェルに滴下する。
2. 接着材使用時以外は蓋をして、蒸発、乾燥、光による硬化を遅らせる。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

1回の使用は30分以内とし、1人の患者に使用後は、清掃、消毒すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

使用後は余った接着材等を拭き取り、次亜塩素酸ナトリウムあるいはエタノールにて消毒すること。また滅菌を行う場合にはエチレンオキシドガス滅菌にて行うこと。複数患者での共用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）