


機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼 JMDNコード 70613001

セイリン小児皮膚鍼

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

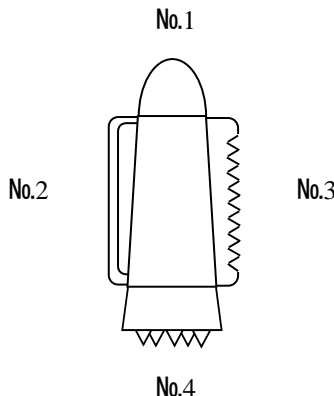

No	構造名称
1	接触部
2	摩擦部
3	摩擦部
4	接触部

【使用目的又は効果】

- 本品は鍼灸用接触鍼である。

【使用方法等】

- 用途(接触・摩擦)に合わせてお使いください。

【使用上の注意】

*<使用注意(次の患者には慎重に適用すること)>

- 妊婦[陣痛を誘発するおそれがある]
- 悪性腫瘍を有する患者[悪性腫瘍の成長、転移を促進させるおそれがある]

<重要な基本的事項>

- 個別包装により、無菌が保たれています。包装がすでに破損または汚損していた場合は、使用しないでください。
- ご使用前に、小児皮膚鍼を点検してください。損傷のある場合には使用しないでください。
- 治療する部位はアルコール綿等でよく清拭し、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染する可能性のある場所を避けて保管してください。

<有効期間>

- 外箱に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: セイリン株式会社
*住所: 〒424-0061
静岡県静岡市清水区大内147
*電話番号: 054-344-7002
製造業者: セイリン株式会社