

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

ヘムコン® カイトガーゼ® HemCon® ChitoGauze®


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
[本品はガンマ線滅菌済のディスプレイ製品であるため。]
2. 再滅菌禁止。
[医療現場での再滅菌を想定していないため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
不織布ガーゼ(レイヨン/ポリエステル ガーゼ)にキトサンをコーティングした帯状の折りたたんだ不織布ガーゼである。

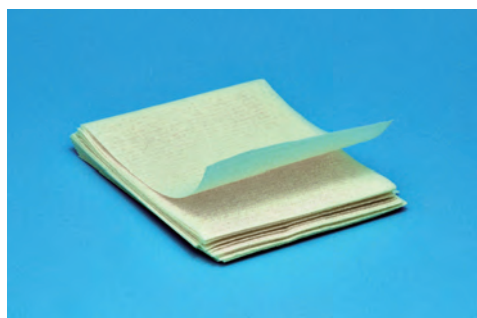

2. 寸法
本品のサイズは下記のとおりである。(公差: ±10%)
(1) 10cm×3.7m


3. 原理
本品で出血面(部位)を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し出血が抑制される。また、赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血のリスクを防ぐ。

【使用目的又は効果】


創傷又は外科切開部を処置するために使用する。

【使用方法等】


1. 滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。

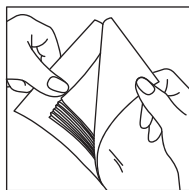


2. 出血創を完全に覆うか、又は包んでください。出血創に確実に接触させてください。場合により複数の本品が必要になるかもしれません。

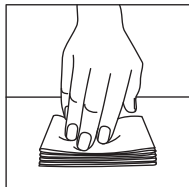


3. 出血しなくなるまで、圧迫してください。

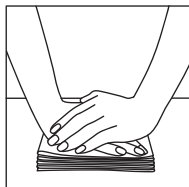

4. 本品で出血創を包み、圧迫を加えながら固定してください。

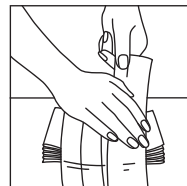

5. 48時間以内に生理食塩水又は滅菌水で本品を取り除いてください。

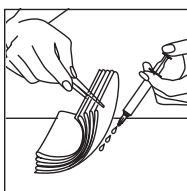

※【使用上の注意】

- ・手術に使用する際は、体内への留置が無いよう注意すること。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
・室温で保管すること。

- ※ 2. 有効期間
・包装に表示の使用期限欄を参照のこと。
[自己認証(製造元データ)による]

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
電話 (03) 3663-2351 (代表)

※※ 製造元
トライコール バイオメディカル
Tricol Biomedical, Inc.
アメリカ合衆国

発売元
ゼリア商事株式会社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 9-7
電話 (03) 3669-3901