

* 2022 年 12 月改訂（第 2 版）
2020 年 5 月作成（第 1 版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 酸素供給用経鼻カニューラ 35201000
酸素供給システム
(鼻腔カニューラ)

再使用禁止

【警告】

使用方法

1. 本品の接続に際し、他機器との接続が正しいこと、及び接続部が確実に漏れがない事を必ず確認すること。[適切な酸素投与を行えないおそれがある]
2. 加湿等により回路内に水がたまった場合は、都度除去すること。[水がたまることにより閉塞のおそれがあるため]
3. 本品の使用に際し、鼻腔挿入部や酸素供給回路に閉塞、劣化や異常(色の变化、変形、部品の剥離等)がないか都度確認すること。常に予備を用意しておき、異常が認められた場合は直ちに交換すること。[閉塞や漏れにより患者に酸素供給不良が生ずるおそれがあるため]
4. 本品の使用中は患者の状態を常にモニターし、回路の外れや閉塞等に注意すること。[患者の体動等により、鼻腔挿入部及びコネクタの接続が外れたり閉塞するおそれがあるため]
5. 本品の使用により患者の皮膚に異常が認められた場合は使用を中止すること。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. FiO₂40%以上を必要とする酸素療法には使用しないこと。[適切な酸素投与を行えないおそれがある]


使用方法

1. 再使用禁止、滅菌禁止。[機能低下のおそれがあるため]
2. 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】


1. タイプ： 鼻腔カニューラ・大人用 細コネクタ (1600)
鼻腔カニューラ・大人用 細コネクタ (16SOFT)
鼻腔カニューラ・大人用 太コネクタ
鼻腔カニューラ・大人用 太コネクタ (ソフトチューブ)
鼻腔カニューラ・大人用 細コネクタ E-ズラップ付
鼻腔カニューラ・小児用 細コネクタ (1602)
鼻腔カニューラ・小児用 細コネクタ (16SOFT-PED)
鼻腔カニューラ・幼児用 細コネクタ (16SOFT-INF)
鼻腔カニューラ・新生児用 細コネクタ (16SOFT-NEO)
鼻腔カニューラ・未熟児用 細コネクタ (16SOFT-PRE)

鼻腔カニューラ E-ズラップ付

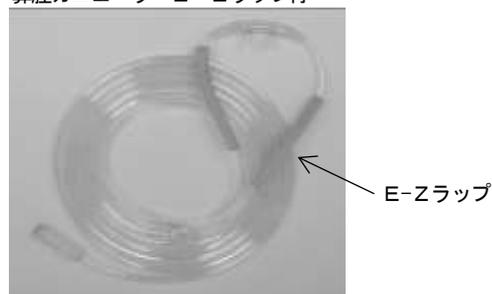

【コネクタタイプ—2種】

細コネクタ ID：5mm 色：透明
太コネクタ ID：7mm 色：バイオレット

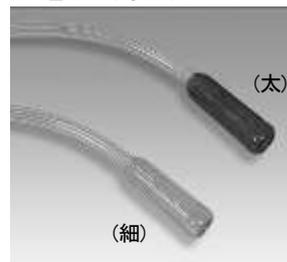

(チューブ長：210cm)

2. 材質

| | |
|----------|---------|
| 鼻腔挿入部 | ポリ塩化ビニル |
| 酸素供給チューブ | ポリ塩化ビニル |
| コネクタ | ポリ塩化ビニル |
| E-ズラップ | ポリエチレン |

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している。(可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用)

【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。
(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具として使用する)

【使用方法等】


本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

本品は酸素療法を行う際に、患者に酸素又は濃縮酸素を供給するカニューラ及び回路を構成する器具である。主に 24%~40%の酸素を吸入する際に使用し、適正な酸素流量は 0.5~6L/分とする

注意：ただし小児用以下のサイズは除く。小児用以下の酸素濃度、酸素流量の設定は医師の判断により設定されること。また使用の際は常に患者を注意深くモニターし、必要に応じて設定を変えること。

1. 使用前

- (1) 予備の同等品を用意しておくこと。
- (2) 包装及び製品に亀裂、破損、障害物、異物等がないか確認すること。異常が認められた場合は、使用しないこと。[閉塞やリークにより重症事故や死亡事故を招くおそれがあるため]

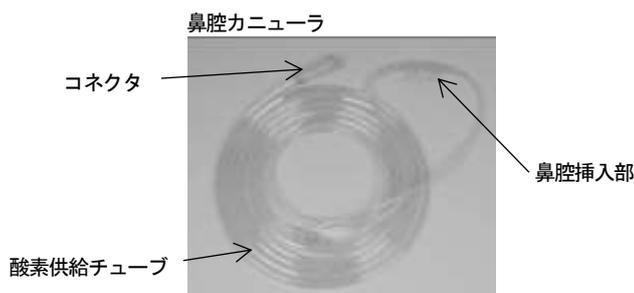

2. 使用方法

- (1) 包装を開封し、製品を取り出す。
- (2) 患者に使用する前に、それぞれの構成品を目視で点検し、正しく機能すること、閉塞がないことを確認する。
- (3) コネクタをヒューミディファイヤー等の加湿システムに接続する。
尚、コネクタタイプは2種あるので、接続の際には適切なタイプを選択すること。

接続方法：加湿システムとの接続



- (4) 酸素供給チューブが途中でねじれていない事を確認する。
- (5) 酸素供給源から供給圧をかけた状態で、酸素の流れを確認し、リークや閉塞など回路に異常がないことを確認する。
- (6) 供給酸素を流したまま、患者の鼻腔に鼻腔挿入部を挿入し、耳掛けチューブを両耳にまわして引掛け、顎下でストッパーを徐々に締め上げて耳から外れ落ちないように調節し固定する。
(E-ズラップ付の場合は、E-ズラップをスライドさせ耳の後ろにフィットするように装着する)

装着外観



E-ズラップ装着



- (7) 医師の管理下で適切な酸素流量を調節すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. カニューラの固定がきつすぎると患者に苦痛を与える可能性がある為、長期使用の患者に対しては固定の調整を注意して行うこと。
2. 本品を使用中は、患者の皮膚の状態に注意し、必要に応じて清拭すること。
3. 酸素濃度、酸素流量の設定は患者への治療方針に基づき、医師の判断により設定すること。また使用の際は常に患者を注意深くモニターし、必要に応じて設定を変えること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

* 有効期間

* 5年[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

ソルターラプズ社

(SALTER LABS)

国名：アメリカ合衆国

お問合せ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011