

* 2022年12月改訂（第2版）
2020年5月作成（第1版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 酸素投与キット 12855000

酸素供給システム
(フェイステント、ネビュテックHDNフィルター)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. フェイステント

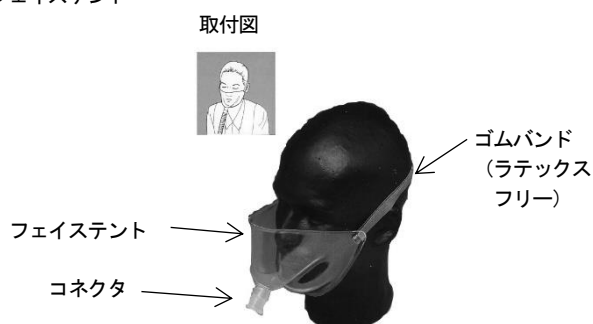


材質

コネクタ	ポリプロピレン
フェイステント	ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している。(可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用)

2. ネビュテックHDN フィルター

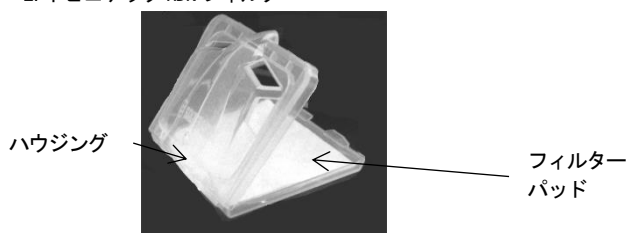

材質

ハウジング	ポリエチレン
フィルターパッド	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。
(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具として使用する)

【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

・フェイステント

鼻・口を中心に顔半分を覆い、顔の上部が開放されたマスクである。
CO₂の蓄積がなく、患者に希釈された酸素を投与することができる。圧迫感が少ないので、回復期の患者に特に適している。

・ネビュテックHDN フィルター

マウスピースバルブ付の呼気バルブに取り付ける。
ネブライザーの薬液が空气中に拡散するのを防ぐ。

【使用上の注意】

その他の注意

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

* 有効期間

* 5年[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

ソルターラブズ社

(SALTER LABS)

国名：アメリカ合衆国

お問合せ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011