

* 2022 年 12 月改訂（第 2 版）
2020 年 5 月作成（第 1 版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

酸素供給システム

（ニップルナット、チューブコネクタ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法


1. 再使用禁止
2. 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. ニップルナット

2. チューブコネクタ

タイプ： チューブコネクタ
チューブコネクタ・シーベル
チューブコネクタ・クリップ付

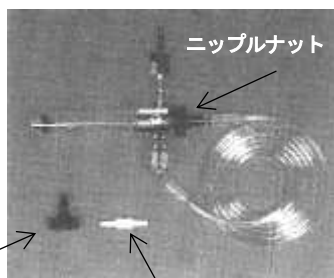

ニップルナット

チューブコネクタ・シーベル

材質

ニップルナット	ABS 樹脂
チューブコネクタ	ポリ塩化ビニル
チューブコネクタ・シーベル	ポリエチレン
チューブコネクタ・ シーベルクリップ付	ポリエチレン

本品のポリ塩化ビニルには可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。
(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具として使用する)

【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

- ・ニップルナット
延長チューブと酸素流量計を接続するコネクタとして使用する。
- ・チューブコネクタ
酸素供給チューブ同士を接続するコネクタとして使用する。

【使用上の注意】

その他の注意

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合はすぐに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

*有効期間

*5 年[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

ソルターラブズ社

(SALTER LABS)

国名：アメリカ合衆国

お問合せ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011