

* 2024 年 7 月改訂（第 3 版）
* 2022 年 12 月改訂（第 2 版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000

酸素供給システム (酸素供給チューブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

1. 再使用禁止
2. 酸素供給以外の目的で使用しないこと。
3. 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

ソルターラブズ社

(SALTER LABS)

国名：アメリカ合衆国

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画本部

* TEL 03-4283-1005

* URL <https://www.mera.co.jp/>


【形状・構造及び原理等】

タイプ：酸素供給チューブ (7')・2.1m

酸素供給チューブ (10')・3.0m

* 酸素供給チューブ (14')・4.2m

酸素供給チューブ

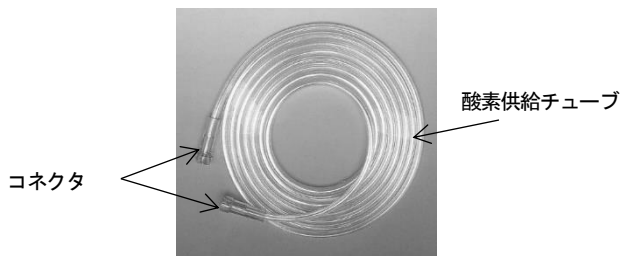

材質

酸素供給チューブ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している。(可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用)

【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。

(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具として使用する)

【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

用途に合わせて長さを選べる。搬送用、病室での使用に合わせて使用すること。チューブの内部はクローパールメンでキンクしにくい形状である。

【使用上の注意】

その他の注意

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

* 有効期間

* 5 年[自己認証（当社データ）による]