

* 2022 年 12 月改訂（第 2 版）
2020 年 5 月作成（第 1 版）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 エアロゾル非再呼吸式マスク 35172000
酸素供給システム
(エアロゾルマスク)

再使用禁止**【禁忌・禁止】**


使用方法

1. 再使用禁止
2. 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. エアロゾルマスク

タイプ：エアロゾルマスク・小児用（ゴムバンドタイプ）
エアロゾルマスク・大人用（ゴムバンドタイプ）
エアロゾルマスク・大人用（耳掛けタイプ）

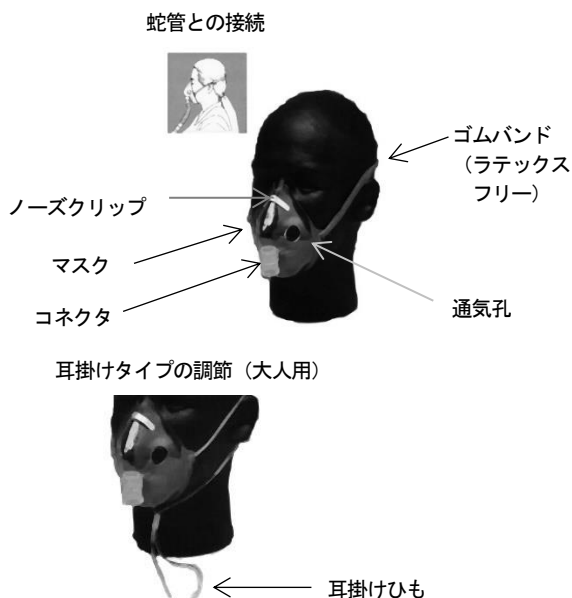

材質

マスク	ポリ塩化ビニル
ノーズクリップ	アルミニウム合金
コネクタ	ポリプロピレン
耳掛けひも	ポリエチレン

ポリ塩化ビニルの可塑剤には、フタル酸ジ - 2 - エチルヘキシルを使用しているものがある。フタル酸ジ - 2 - エチルヘキシル不使用のものは、法定ラベルに記載のロット番号が NOP から始まる。

【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。

(本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具として使用する)

【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。

・エアロゾルマスク

吸入療法用の酸素マスクである。多量の酸素と水分を投与するため、患者の呼吸を逃す通気孔がある。

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

本品をMRI環境下で使用する場合は、ノーズクリップの取り外しを考慮すること。取り外したノーズクリップは、再利用しないこと。
[ノーズクリップ（アルミニウム合金製）が撮影画像に影響を与えたり、発熱するおそれがある]

その他の注意

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。

*有効期間

*5 年[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

ソルターラブズ社

(SALTER LABS)

国名：アメリカ合衆国

お問合せ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011