

機械器具 (05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
*管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000

メラ麻酔器用呼吸回路 (Y 回路)

大人用 90、大人用 120、大人用 180、小児用 60、小児用 90、小児用 120


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

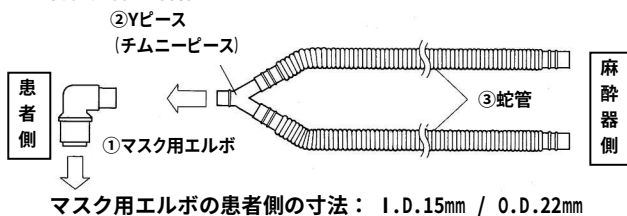

2. 種類と構成

型 式	蛇管の長さ (mm)	蛇管の外径 (mm)
大人用 90	900	28φ
大人用 120	1200	28φ
大人用 180	1800	28φ
小児用 60	600	11φ
小児用 90	900	11φ
小児用 120	1200	11φ

※ 本品には、ラテックスゴムを使用していません。
本品は未滅菌です。

3. 原理

麻酔器から送気される吸気 (空気又は酸素を含む医療ガス) は、吸気側の蛇管から Y ピースを通して、患者へ送入される。患者から排出される呼気は、Y ピースから呼気側の蛇管を通り装置へ戻される。

【使用目的、効能又は効果】

全身麻酔を施すための機器のうち、麻酔器用呼吸回路。

【品目仕様等】

1. 漏れ: 空気圧 30hPa での漏れ量が毎分 30mL 以下。

【操作方法又は使用方法等】

1. Y ピース②の麻酔器側 (二股に分かれている側) に、蛇管③を【形状・構造及び原理等】の図の様に接続する。
2. Y ピース②の患者側に マスク用エルボ①を接続する。
3. 蛇管③の麻酔器側ソケット (内径 22mm) の 1 方を 麻酔器の吸気弁側に接続し、他方の蛇管のソケットを呼気弁側に接続する。
4. マスク用エルボ①の患者側は、外径 22mm/内径 15mm になっているので、そのままマスク又は気管内チューブに接続する。

【使用上の注意】

1. 本品は、1 回使用製品なので、再使用しないこと。
2. 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。 [樹脂部品にひびを生ずることがある]
3. 本品を使用する前に、梱包が損傷を受けていたり、回路が損傷 (亀裂・破損)・変色・変形している場合は使用しないこと。
4. 蛇管を極端に折り曲げないこと。

5. 長時間使用すると、呼気側蛇管に水滴が溜まることもある。
6. 本品を麻酔器等の装置に取り付けたときは、装置の添付文書に従ってリーク試験を行い、リークがないことを確認してから使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水漏れ、ほこり、高温 (50℃以上)、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所などは避けること。
2. 有効期間・使用の期限
ラベルに記載されている製造年月から 3 年。

【包装】

- 1 個 / 1 密閉袋 に収納。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者
メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名: フィリピン

お問い合わせ先
本社商品部 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011