

メラブリージングコネクタ

再使用禁止

【警告】

1. 本品を他の呼吸管理器具（呼吸回路など）と接続する場合は確実に接続されていること（リーク、閉塞、接続が緩いなどの問題がないこと）を確認し、使用中も十分な管理、観察を行うこと。[接続が不完全な場合、呼吸困難などを引き起こすことがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 滅菌、洗浄禁止
3. 酸素を使用している場合は、周囲で火気及びスパークの発生する可能性がある物を使用しないこと。[発火・爆発を誘発する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

図 1. エルボコネクタ


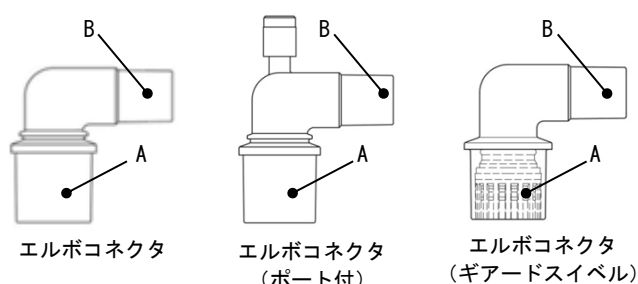


図 2. T アダプタ

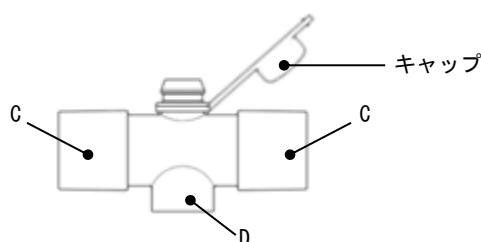

2. 種類と構成

表 1. エルボコネクタ

型式	寸法		死腔
	A	B	
エルボコネクタ			
エルボコネクタ（ポート付）	15/22mm 雌雄同軸円すいコネクタ	15mm 雄円すいコネクタ	約 10mL
エルボコネクタ（ギアードスイベル）			

表 2. T アダプタ

型式	寸法	
	C	D
気管切開用 T アダプタ	22mm 雄円すいコネクタ	15mm

3. 原理

他の医療機器同士を連結することが出来る。

【使用目的又は効果】

呼吸回路の連結などを目的として使用する。

【使用方法等】


使用方法

本品（未滅菌）は、単回使用製品であるので、再使用しないこと。

1. 接続しようとする呼吸回路部品に対して、本品のうち適当な形状を選択する。接続部が緩まないように確実に接続する。使用方法等に関連する使用上の注意

1. エルボコネクタ（ギアードスイベル）の 15mm 雌円すいコネクタに人工鼻、フィルタ付き人工鼻、マスク等の 15mm 雄円すいコネクタを接続するときは、エルボコネクタの 15mm 雌円すいコネクタを摘んだ状態（内部の回転コネクタがロックされる）で捻りながら強く押し込み確実に接続すること。外すときは、同様に 15mm 雌円すいコネクタを摘んだ状態で回転させ外すこと。（15mm 雌円すいコネクタは回転機能があるため）（図 3 参照）

図 3. 医療機器の取り付け、取り外し方法

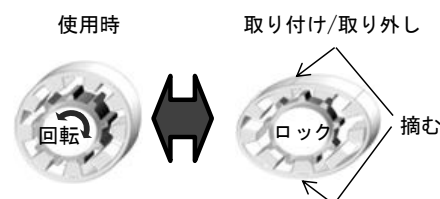

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品はコネクタ接続部の形状が JIS T 7201-2-1：1999 に適合した医療機器と接続して使用すること。
2. 薬液（アルコール、界面活性剤など）で濡らして使用しないこと。[ひび割れ等の危険がある]
3. 他の医療機器と組合わせて使用する際は、安全確認を行ってから使用すること。
4. 本品は未滅菌のため、清潔野で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管の条件

水漏れ、ほこり、高温（50℃以上）、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

有効期間

包装箱に記載。[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名：フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011