

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用手術用パンチ 35285012

A & E サージカルパンチ

再使用禁止

【警告】

1. 孔を作製後、プランジャーを押し下げたまま術野外に移動すること。[切除した組織が術野内又は血管内に落下するおそれがある]
2. 変性した組織に使用しないこと。[本品が切除した組織を捕捉することができずに大動脈に塞栓を起こすおそれがある]
3. 保護キャップは取り外した後、直ちに廃棄すること。[保護キャップが術野内に落下するおそれがある]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

図 1：形状外観図

①カッティングチップ



②カッティングブレード

③フィンガーグリップ

④プランジャー

図 2：フラットタイプ



図 3：テーパータイプ



2. 呼称サイズ（mm）

2. 7、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0

3. 原理

先端のカッティングチップ部を目的部位に挿入し、プランジャーを押すことにより、先端部が引き込まれる際に回転（回転幅 90°）しながら孔を作製する。切除した組織はカッティングチップ部の内側に保持され体内、術野等への落下を防止する。

【使用目的又は効果】

組織、血管等に孔を作製するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に本品の滅菌包装に損傷がないことを確認すること。包装が開封又は破損している場合は使用しないこと。
2. 無菌操作により本品を取り出す。先端部に取り付けられている保護キャップを取り外す。
3. フィンガーグリップに指をかけプランジャーを押し込むと、カッティングチップがカッティングブレード内へ引き込まれることを確認する。術中又は本品を使用する前に数回動作さ

せ、動作が不自然な場合は使用を中止すること。

4. 孔を作製する部位に切開を加える。切開はカッティングチップの径より僅かに小さい程度で良い。切開口にカッティングチップを挿入し切開の中心部に置く。
5. 組織に対して垂直に本品をたてプランジャーを押す。孔が作製された後、プランジャーは押し下げたままにしておくこと。
6. プランジャーを押し下げたまま、切開口から取り外す。
7. 術野外でゆっくりプランジャーを戻し、カッティングチップに切除された組織が保持されていることを確認する。
8. 術野外で切除された組織をカッティングチップより取り除く。

図 4：先端部

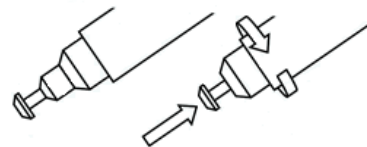


図 5：孔の作製



【保管方法及び有効期間等】

保管の条件

高温を避け、乾燥、清潔、塵やほこりのない環境下で保管すること。

有効期間

本品の個装表示ラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社

製造業者

エアンドイー メディカル コーポレーション

（A & E Medical Corporation）

国名：アメリカ合衆国

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011