

\*2017年12月（第5版）  
2016年3月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 酸素投与キット 12855000

## 酸素供給システム （フェイス TENT、ネビュテック HDN フィルター）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


#### <使用方法>

- ・本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

#### 【形状・構造及び原理等】

本製品は下記の種類がある。


##### 1. フェイス TENT

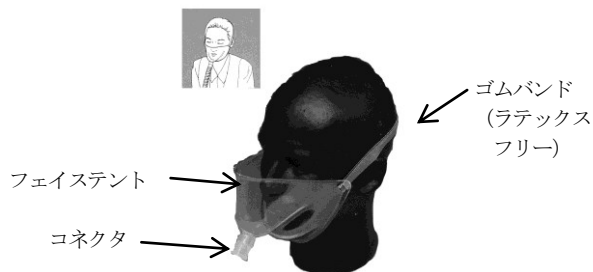

コネクタ	ポリプロピレン
フェイス TENT	ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している（可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用）。

##### 2. ネビュテック HDN フィルター

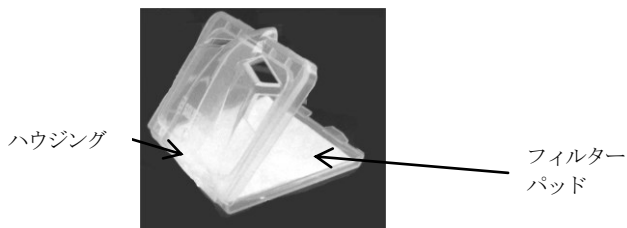

ハウジング	ポリエチレン
フィルターパッド	ポリプロピレン

#### \* 【使用目的又は効果】

本品は未滅菌品である。

（本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具である。）

#### \* 【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

- ・フェイス TENT

鼻・口を中心に顔半分を覆い、顔の上部が開放されたマスクである。CO<sub>2</sub> の蓄積がなく、患者に希釈された酸素を投与することができる。圧迫感が少ないので、回復期の患者に特に適している。

- ・ネビュテック HDN フィルター

マウスピースバルブ付の呼気バルブに取り付ける。  
ネブライザーの薬液が空气中に拡散するのを防ぐ。

#### 【使用上の注意】

##### <その他の注意>

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元] 泉工医科貿易株式会社

\* [製造元] Salter Labs  
ソルターラブズ社  
アメリカ合衆国

[お問合せ先] 泉工医科工業株式会社 商品企画  
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011