

*2017 年 12 月（第 5 版）
2016 年 3 月（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 エアロゾル非再呼吸式マスク 35172000

酸素供給システム （エアロゾルマスク）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

＜使用方法＞


- ・本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

*【形状・構造及び原理等】

本製品は下記の種類がある。

1.エアロゾルマスク

タイプ：エアロゾルマスク・小児用
エアロゾルマスク・大人用
エアロゾルマスク・大人用（耳掛けタイプ）
エアロゾルマスク・大人用（エクストラ）

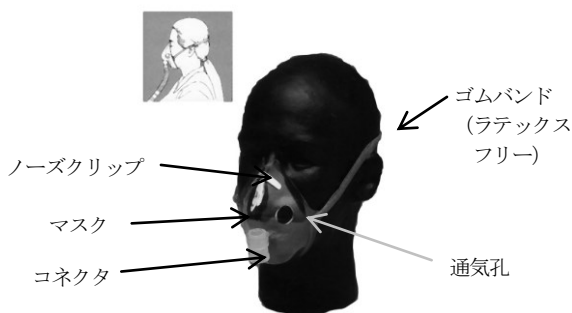

マスク	ポリ塩化ビニル
ノーズクリップ	アルミニウム合金
コネクタ	ポリプロピレン
耳掛けひも	ポリエチレン

ポリ塩化ビニルの可塑剤には、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用しているものがある。フタル酸ジ-2-エチルヘキシル不使用のものは、法定ラベルに記載のロット番号がNOP から始まる。

*【使用目的又は効果】

本品は、未滅菌品である。

（本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具である。）

*【使用方法等】

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

・エアロゾルマスク

吸入療法用の酸素マスクである。多量の酸素と水分を投与するため、患者の呼吸を逃す通気孔がある。

【使用上の注意】

＜その他の注意＞

本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用すること。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕 泉工医科貿易株式会社

*〔製造元〕 Salter Labs
ソルターラブズ社
アメリカ合衆国

〔お問合せ先〕 泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011