

医療用品 (04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDN コード: 34864000)

カバープラスチックバリア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本品は、身体の部位に用いる、粘着剤及びパッドを付した救急絆創膏材である。パッド部分に薬剤は含まれていない。

2. 形状及び寸法 (mm)

1) 形状


①支持フィルム、②粘着剤、③パッド、④剥離紙

<断面図>

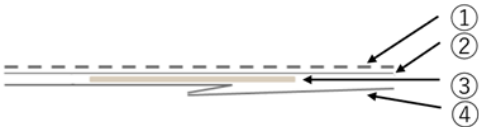


<平面図>

製品サイズ: 22×22

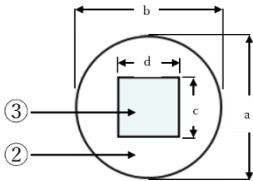

製品サイズ: 22×38, 22×63, 38×38, 38×63, 50×72

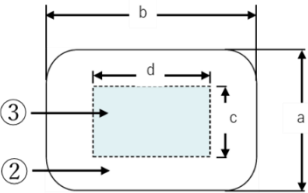

2) 寸法

製品 サイズ	a	b	c	d
22×22	22	22	10	10
22×38	22	38	12	18
22×63	22	63	12	25
38×38	38	38	18	18
38×63	38	63	19	30
50×72	50	72	25	40

3. 原材料

アクリル系粘着剤、ビスコース/ポリプロピレン/ポリエチレン不織布、
ポリエチレンコート

【使用目的又は効果】

本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の
支持等の目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備:

- 1) 手を洗い乾燥させ、可能であれば、使い捨て手袋を着用する。
- 2) 傷口と周囲の皮膚を、飲料水程度に清潔な流水で洗浄する。
- 3) 本品を貼付する皮膚を清潔なタオル又はパッドで乾燥させる。
- 4) 傷口が出血している場合は清潔なガーゼ包帯又は布で圧迫し、出血が止まるまで高い位置に上げる。
- 5) パッドが傷口に合うサイズであることを確認する。

2. 貼付:

- 1) 剥離紙を部分的に剥がし、剥離紙を持つ。
- 2) パッドや粘着剤に触れないように本品を取り扱う。
- 3) パッドが傷口に当たるように、かつ粘着剤が皮膚に当たるように本品を上から貼付する。
- 4) 剥離紙を完全に剥がし、本品の端を押さえる。

3. 除去(剥離):

本品の端をつかみ、皮膚に対して折り返すように剥がす。このとき、傷の表面が損傷しないように、皮膚を押さえながら剥がす。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

包装に汚れ、破れがある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は製品包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社

電話番号: 03-3491-2064

外国製造業者: ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベーハー

BSN medical GmbH

国名: ドイツ