

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 (JMDNコード: 34864000)
カバープラスチックスタンダード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 概要

本品は、身体の部位に用いる、粘着剤およびパッドを付した救急絆創膏材である。パッド部分に薬剤は含まれていない。

2. 形状及び寸法

①支持フィルム、②粘着剤、③パッド、④剥離紙
19mm×72mm

<断面図>

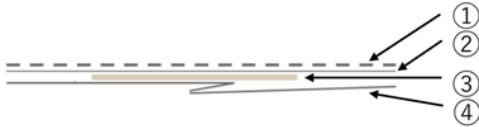

3. 原材料

ポリエチレンコート、アクリル系粘着剤、
ビスコース/ポリプロピレン/ポリエチレン不織布

【使用目的又は効果】

本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等の目的で使用される。

【使用方法等】

1. 使用前の準備:

- 1) 手を洗い乾燥させ、可能であれば、使い捨て手袋を着用する。
- 2) 傷口と周囲の皮膚を、飲料水程度に清潔な流水で洗浄する。
- 3) 本品を貼付する皮膚を清潔なタオル又はパッドで乾燥させる。
- 4) 傷口が出血している場合は清潔なガーゼ包帯又は布で圧迫し、出血が止まるまで高い位置に上げる。
- 5) パッドが傷口に合うサイズであることを確認する。

2. 貼付:

- 1) 剥離紙を部分的に剥がし、剥離紙を持つ。
- 2) パッドや粘着剤に触れないように本品を取り扱う。
- 3) パッドが傷口に当たるように、かつ粘着剤が皮膚に当たるように本品を上から貼付する。
- 4) 剥離紙を完全に剥がし、本品の端を押さえる。

3. 除去(剥離):

本品の端をつかみ、皮膚に対して折り返すように剥がす。このとき、傷の表面が損傷しないように、皮膚を押さえながら剥がす。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

包装に汚れ、破れがある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて、保管すること。

<有効期間>

使用期限は製品包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社
電話番号: 03-3491-2064

外国製造業者: ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベアー
BSN medical GmbH
国名: ドイツ