

医療用品(04) 整形用品  
一般医療機器 手術用被覆・保護材 (JMDNコード: 34654000)  
ロイコメドパッド付不織布ドレッシング

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状・構造等

＜断面図＞

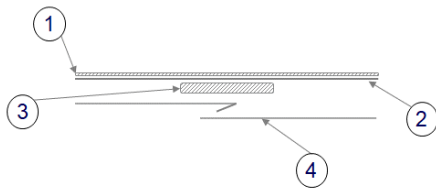

- ①裏打ち
- ②粘着剤
- ③パッド
- ④剥離紙

原材料: ポリアクリレート、ビスコース/ポリプロピレン不織布、  
ポリエチレンコート

**【使用目的又は効果】**

本品は、術後創傷を被覆し、保護する目的で使用する。

**【使用方法等】**

## 1. 使用前の準備:

- 1) 手指を洗ったのち、適切な方法で創傷を洗浄して清潔にする。
- 2) 周囲の皮膚が乾燥していることを確認する。
- 3) 創傷を覆い、創縁に重なる適切なサイズの本品を選択する。
- 4) 開封されていないこと、汚れ、破れが無いことを確認する。
- 5) 開封し、本品を無菌的に取り出す。

## 2. 貼付:

剥離紙を剥がし、パッドや粘着剤に触れないよう取り扱う。パッドが創傷を覆うように本品を皮膚に貼付する。残りの剥離紙を剥がし、皮膚に密着させる。

## 3. 除去(剥離):

本品の端をほぐし、皮膚に対して平行に真っ直ぐ伸ばして剥がす。このとき、創傷の表面が損傷しないように、皮膚を押さえながら剥がす。

**【使用上の注意】**

＜重要な基本的注意＞

包装に汚れ、破れがある場合は使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

## 1. 保管の条件

高温、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて、保管すること。

## 2. 有効期間

使用期限は製品包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社

電話番号: 03-3491-2064

外国製造業者: ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベーハー

BSN medical GmbH

国名: ドイツ