

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 (JMDNコード: 34654000)
(カテーテル被覆・保護材(コード: 70444000))
ロイコメドTフィルムドレッシング

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

〈断面図〉

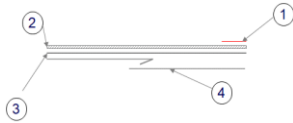

- ①貼付補助テープ
- ②裏打ち
- ③粘着剤
- ④剥離紙

原材料: ポリウレタン、ポリアクリレート

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷を被覆し、保護する目的で使用する。
又は注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付して、その固定に用いることもある。

【使用方法等】

1. 貼付

- 1) 剥離紙を剥がし創部へ貼付する。
- 2) 本品を上から押さえ、粘着させる。
- 3) 貼付補助テープを持ち裏打ちのポリエステルフィルムを剥がす。

2. 除去

- 1) 本品の端をつかみ、創傷面から優しく本品を剥がし適切に廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

包装に汚れ、破れがある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて、保管すること。

2. 有効期間

使用期限は製品包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社
電話番号: 03-3491-2064

外国製造業者: ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベーハー
BSN medical GmbH
国名: ドイツ