

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 (JMDNコード: 34654000)

ロイコメドCフィルムドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造等

〈断面図〉

- 製品サイズ: 5×7cm、7×10cm、8×15cm



- 製品サイズ: 10×24cm、10×35cm

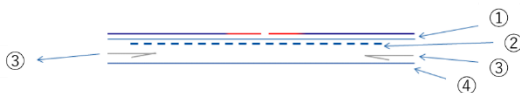

- トップフィルム
- ハイドロポリマーパッド
- 剥離紙(白)
- 剥離紙(透明)

原材料: ポリウレタン、アクリル系粘着剤、アクリル酸ポリマー

【使用目的又は効果】

本品は、術後創傷を被覆し、保護する目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 貼付前に創傷部、及びその周囲の皮膚を洗浄・消毒等によって清潔にし、本品を貼付する皮膚は十分に乾燥させる。
- ハイドロポリマーパッドが創傷部の周囲の皮膚を覆うよう、貼付部位にあったサイズを選択する。

2. 貼付

- 剥離紙(透明)を剥がす。
- ハイドロポリマーパッドを創傷部に対し中央に合わせ、傷を覆うように貼付する。
- 剥離紙(白)を剥がす。
- 粘着面の境界を静かに押さえ、密着させる。
- トップフィルムの赤いタブを持ち、支持フィルムを剥がす。
- 粘着面の境界を静かに押さえ、密着させる。

3. 除去・交換

- 必要に応じて、滅菌済生理食塩液にて湿らせ、本品の端をつかみ、ゆっくりと剥がす。
- 必要に応じて、創傷部を滅菌済生理食塩液又は精製水で傷を洗浄し、乾燥させた後に新しい本品を適用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 定期的な創傷部の状態を確認すること。
- 創傷部の状態に応じて、最大14日間連続貼付を限度として適宜交換すること。
- 十分な観察の下に使用し、創傷部への累積30日を超える長期使用は避けること。
- 一度適用した本品の防水性を保つため、本品を切らないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- アルコール性の洗浄液や強い着色料と併用しないこと。
- 本品の除去後にハイドロポリマーパッドの残存が創傷部に残っている場合、滅菌済生理食塩液又は精製水で除去することができる。
- グリセリン又はハイドロゲルに対するアレルギーを持つ患者には使用しないこと。使用してしまった場合は、本品を剥がし滅菌済生理食塩液又は精製水で洗浄すること。
- まれに除去直後に色の変化やかゆみなどの皮膚反応が発生し、時間経過と共に治癒することがあるため、十分な観察を行うこと。
- 治癒の過程による組織の除去により、創傷部が大きくなる可能性がある。最初の数回の本品交換後も創傷部が大きくなる場合は適切な治療を実施すること。
- 使用中に異常が認められた場合は適切な治療を実施すること。
- 放射線療法、圧迫療法の前に本品を除去すること。
- 包装に汚れ、破れがある場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温、多湿、水濡れ及び直射日光を避けて、保管すること。

2. 有効期間

使用期限は製品包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: センチュリーメディカル株式会社
電話番号: 03-3491-2064

外国製造業者: ビーエスエヌ メディカル ゲーエムベーハー
BSN medical GmbH
国名: ドイツ