

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ペーパーコン


PAPER CONE

【形状・構造等】


本材は、サンドペーパーをコーン状（円錐形）に巻き上げ形成した歯科用研磨器材である。

1. 形状

エンジン用ペーパーコンの形状

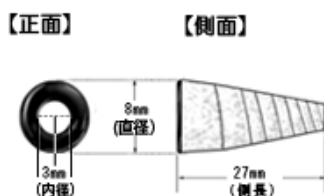

レーズ用ペーパーコンの形状

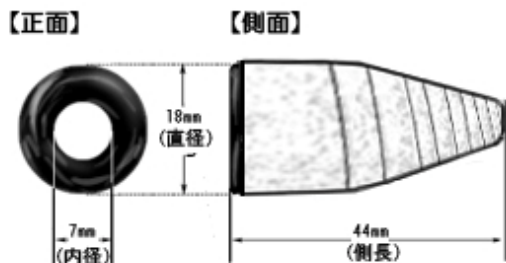

2. 組成

サンドペーパー・セロファン・澱粉糊・工業用膠

【使用目的、効能又は効果】

本材は義歯の研削及び研磨に用いる事を目的とし、義歯の創作工程の一環として使用する歯科用研削材料である。

【操作方法又は使用方法等】

【エンジン用】

本材を装着可能な歯科用マンドレールに装着後、歯科用エンジンで回転させ断続的に被研削物に押し当てて研削、研磨を行う。

【レーズ用】

本材を歯科用電気レーズに装着後、回転させ断続的に被研削物を押し当てて研削、研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. エンジン用ペーパーコンは歯科用マンドレールに、レーズ用ペーパーコンは歯科用電気レーズに確実に装着すること。
2. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
3. マンドレールが折れ曲がったり、本材が破損する恐れがあるので、回転数に留意し、無理な角度及び過度の加圧下での使用は避けること。
4. MAX20,000 回転以下で使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1) 指定の回転数（MAX20,000 回転以下）を越えて使用しないこと。
- (2) 損傷及び変形（曲がり、汚れ等）したものは、使用しないこと。
- (3) 本材を【使用目的、効能または効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。
- (4) 本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本材を使用する際には、眼や手の損傷を防ぐための保護メガネ・保護手袋を使用すること。また、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスクを使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 水分、直射日光及び腐食性薬液とその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管及び管理すること。

【有効期間・使用の期限（耐用期間）】

本材の有効期間は製造日より一年間とする。

2006 年 11 月 20 日（第 1 版）
*2007 年 09 月 06 日（第 2 版）

*医療機器許可番号：40B3X00004

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ペーパーコン

PAPER CONE

（ 製造日は本材を梱包した箱の底面に貼付する ）

【包装】

【エンジン用 ペーパーコン】

ペーパーコン 荒 1 箱（100 粒入り）
ペーパーコン 中 1 箱（100 粒入り）
ペーパーコン 細 1 箱（100 粒入り）
ペーパーコン 細々 1 箱（100 粒入り）
ペーパーコン 混合 1 箱（100 粒入り）
混合内訳 荒...10 粒 中...40 粒 細...50 粒

【レーズ用 ペーパーコン】

ペーパーコン 荒 1 箱（10 粒入り）
ペーパーコン 中 1 箱（10 粒入り）
ペーパーコン 細 1 箱（10 粒入り）
ペーパーコン 混合 1 箱（10 粒入り）
混合内訳 荒...5 粒 中...5 粒

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者：晴光社

住所：〒830 -0037 福岡県久留米市諏訪野町 2040

電話番号：0942 -32 -7333 Fax. 0942 -37 -0409

晴光社