

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ
モノポーラアダプター φ8
φ8ユニバーサル


70657000

***【禁忌・禁止】**

- 本品は電気手術器専用のモノポーラ用アダプターです。他の用途には使用しないこと。[熱傷や機器の破損の恐れがある]
- 付属品は定められた接続端子に正しく接続し、誤った接続で使用しないこと。[熱傷や機器の破損の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

形状、外形寸法

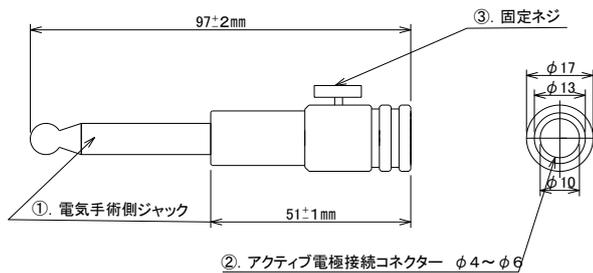

型式 . . . φ8ユニバーサル

***原理**

本品は電気手術器に接続し、モノポーラコード等を接続する際使用するアダプター。

*定格電圧：4500Vp

***【使用目的又は効果】**

本品は電気手術器に装着し、電気手術器とモノポーラコードを変換するためのアダプター。

***再使用のために必要な処置**

使用後は【保守・点検に係る事項】の滅菌及び使用者による保守点検事項を行うこと。


使用目的に関連する使用上の注意

1. 本品を用い接続する電気手術器側のモノポーラ出力端子寸法は、【形状・構造及び原理等】の項、①の外形寸法に合致すること。
2. 本品を用い接続するアクティブ電極コードのプラグ形状は、【形状・構造及び原理等】の項、②の外形寸法に合致すること。

【使用上の注意】

使用上の注意事項

1. 使用するにあたり接続する電気手術器と付属品の取扱説明書及び添付文書をよく読んで使用すること。
2. 使用前に必ず製品外観の点検を行い、破損、亀裂、変形等の異常があった場合は使用しないこと。
3. 使用の際は必ず電極差し込み口の奥までプラグを挿入すること。 図のようにプラグ電極の金属が露出していると、意図しない組織に放電したり術者の指に放電したりして熱傷する可能性がある。
4. 接続するプラグを差し込んだ後、必ず固定ネジを締めて使用すること。
5. 接続部に薬液等の浸入が無いように、注意すること。
- *6. 電気手術器の使用モードの最大高周波ピーク電圧を確認し、本品の定格電圧の範囲内で使用すること。

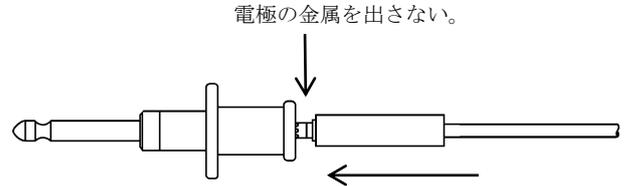

****【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管条件 温度 0℃~50℃ 湿度 30%~90%
2. 本品は、取扱い状況、保管状態などの条件で有効期間が大きく左右されるため、有効期間を定めることが出来ないが、使用前に本品にキズ、劣化等が無いか確認し、異常があった場合は使用せずに廃棄すること。
3. 廃棄する際は、一般医療廃棄物として廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・滅菌

1. 本品は、オートクレーブ滅菌又はガス滅菌等の滅菌を行うと本来の性能が発揮できなくなる可能性があるため、滅菌せず消毒処理とすること。
2. 消毒はアルコールを浸したガーゼ等で拭き、よく乾燥させた後、使用すること。

***使用者による保守点検事項**

1. 点検は使用する前日又は直前に行うこと。
2. 目視及び専用アクセサリを接続して検査すること。
3. 本品は接続不良を防止するために定期的（1年間又は100回の使用を目安）に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 セムコ

〒123-0851 東京都足立区梅田 4-16-8

製造元：株式会社 セムコ