

機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 高周波処置用能動器具 70662000
アクティブ電極

**メスホルダーアダプター (DIN3P→3P・DIN4P→3P・3P→3P*)

【禁忌・禁止】


- 本品は電気手術器(電気メス)専用のメスホルダー用アダプターです。他の用途には使用しないこと。
- 付属品は定められた接続端子に正しく接続し、誤った接続で使用しないこと。
- 本品を切断・変形・改造して使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状、外形寸法



DIN3P→3P 全長：200mm
DIN4P→3P 全長：200mm

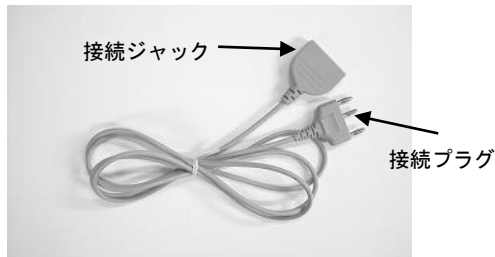

*3P→3P 全長：2m

**原理

本品は電気手術器に接続して使用するメスホルダー用のアダプターであり、電気手術器より出力された高周波電流を、接続したメスホルダーへと中継する。

**定格電圧：4500Vp

【使用目的又は効果】

本品は電気手術器に装着し、電気手術器とメスホルダーコードを変換するためのアダプター。

**【使用方法等】


1. メスホルダーアダプター接続ジャックに、使用するメスホルダーの接続プラグを差し込み接続する。
2. メスホルダーアダプター接続プラグを電気手術器に接続する。
3. 使用する場合はメスホルダーのスイッチを使用し。切開は切開スイッチ（黄色）、凝固は凝固スイッチ（青色）を押すとメス先電極より出力される。

**再使用のために必要な処置

使用後は【保守・点検に係る事項】の洗浄・消毒・滅菌及び使用者による保守点検事項を行うこと。

【使用上の注意】

1. 使用するにあたり接続する電気手術器と付属品の取扱説明書及び添付文書をよく読んで使用すること。
2. 使用前に必ず製品外観の点検を行い、破損、亀裂、変形等の異常があった場合は使用しないこと。
3. 使用の際は必ず電極差し込み口の奥までプラグを挿入すること。図のようにプラグ電極の金属が露出していると、意図しない組織に放電したり術者の指に放電したりして熱傷する可能性がある。
4. 接続部に薬液等の浸入が無いように、注意すること。

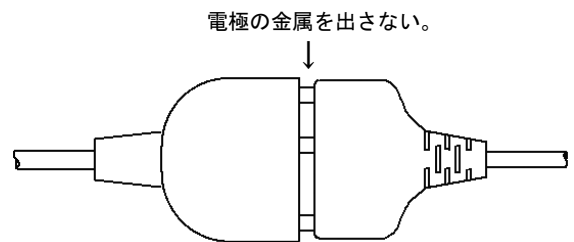

**5. 電気手術器の使用モードの最大高周波ピーク電圧を確認し、本品の定格電圧の範囲内で使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件は温度 0℃～50℃、湿度 30%～90%
2. 殺菌用の紫外線灯下での保管は、短期間でも樹脂部が急速に劣化・損傷を受け、故障・破損等の原因となるので使用禁止。
3. 本品は、取扱い状況、滅菌状況、保管状態などの条件で使用期間が大きく左右されるため、有効期間を定めることが出来ない。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒・滅菌

1. 本品は、オートクレーブ滅菌又はガス滅菌等の滅菌を行うと本来の性能が発揮できなくなる可能性があるため、滅菌せず消毒処理とすること。
- **2. 拭くときは本体又は接続プラグを持ってコードを強く引っ張らないこと。
- **3. 消毒はアルコールを浸したガーゼ等で拭き、完全に乾燥させる事。

**使用者による保守点検事項

1. 点検は使用前の直前又は直前に行うこと。
2. 目視及び専用アクセサリを接続して検査すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 セムコ
〒123-0851 東京都足立区梅田 4-16-8

製造元：株式会社 セムコ