



リンパマッサージソックス  
**ムクミキュア**  
オープンタイプ

Leg massage socks

ご使用に際して、このパッケージの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。  
2016年10月作成(第2版 新記載要領に基づく改訂) 製造販売届出番号:04B2X00009000001

機械器具 12 理学診療用器具  
一般医療機器 弾性ストッキング JMDNコード:31724000  
販売名:ムクミキュア

【形状・構造及び原理等】

足首からふくらはぎ部分にかけて段階的に圧迫することで、静脈血、リンパ液の流れを促進する。(※組成については品質表示参照)右記のサイズ表にしたがって、あなたに合うサイズをお選びください。S-MとM-Lサイズの両方に該当する場合は、ふくらはぎのサイズを優先してください。

サイズ (cm)	S-M	M-L
測定部位		
ふくらはぎ	30-36	36-42
足首	19-22	22-25
足サイズ	22-24	23-26

【使用目的又は効果】

脚のむくみ、疲れを軽減する。リンパの流れを改善する。血行を促進する。

【使用方法等】

脚のむくみや疲れが気になるときはいてください。帰宅後やお風呂上りに30分程度はくと、効果的です。●着用後、生地の凹凸の跡が脚に残る場合がありますが、しばらくすると元に戻ります。

【使用上の注意】


■次の方は着用前に医師にご相談ください。

- 1) 現在、病氣やけがなどによる脚のむくみやだるさを感じる方
- 2) 血圧の高い方、心臓・腎臓などに障害のある方
- 3) 現在、かゆみや発疹をおこしている方
- 4) 血行障害をおこしたことがある方

■くつ下をひざ裏にかかるとまで引き上げすぎないようにしてください。ひざ裏の血行を悪くする可能性があります。■30分以上はいても問題ありません。ただし、就寝時の使用は避けてください。■サイズが合わないものは使用しないでください。■気分が悪くなったり、かゆみ、発疹、痛みなどの異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

【保守・点検に係る事項】

<洗濯方法>水またはぬるま湯(30℃以下)で洗濯してください。  
(注意) 1) さらし粉などの塩素系漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使用しないでください。2) 色の違うもの(特に白色)と一緒に洗ったり、脱水後に重ね置きしないでください。3) 乾燥機やアイロンのご使用はお控えください。4) 繊細な衣類と一緒に洗うと、繊細な衣類を傷める恐れがありますので、本品を洗濯ネットに入れて洗ってください。

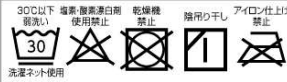

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道徳町4-10

製品のお問い合わせ先(お客様相談室)

☎0120-5884-06

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日も可)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒950-3408 宮城県黒川郡大和町松坂4-3



0 000000 000000

00000000



ムクミキュア  
オープンタイプのはき方



1 くつ下をたくりよせて、つま先を入れます。



2 足首回りまで引き上げ、かかとの位置を合わせます。



3 両手で少しずつ引き上げます。この時、靴下の4本線の中が真後ろにくるように着用してください。

包装 ... 1足

品質表示

ナイロン、ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン



MADE IN JAPAN

リンパマッサージソックス

**ムクミキュア**  
オープンタイプ

リンパマッサージソックス

**ムクミキュア**  
オープンタイプ

おうちで30分はくだけ



リンパの流れを刺激する凹凸編み

段階締めつけ圧

しっかりした締めつけで集中ケア

パイル編みで足底刺激




むくんだ脚をラクにする

製品特徴

おうちでくだけで、むくんだ脚をマッサージ!

- リンパの流れに沿った凹凸編みがむくんだ脚を程よく刺激、リンパの流れを改善します。
- 上踏ます部のパイル編みが足底を刺激します。
- 段階的な締めつけが血流を押し上げ、脚をすっきりさせます。
- 洗濯機で洗えるので、便利です。

リンパの流れを刺激する凹凸編み

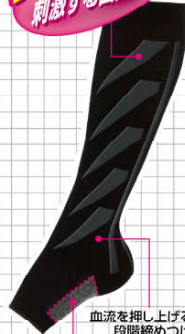

血流を押し上げる段階締めつけ

足底を心地よく刺激するパイル編み