


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 クラス I 歯科用ゴム製研磨材 JMDN:70903000

セレック テクノポリッシャー

*【形状・構造及び原理等】

- 成分
シリコンゴム、二酸化チタン、その他
- 形状

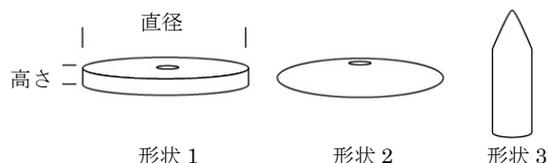

- ・セレックテクノポリッシャー-2301 形状1 直径22mm 高さ3mm
- ・セレックテクノポリッシャー-2302 形状2 直径22mm 高さ4mm
- ・セレックテクノポリッシャー-2304 形状3 直径6mm 高さ24mm

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: セレック株式会社
住所: 〒543-0011
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号: 06-6765-0691
FAX番号: 06-6765-0690
製造業者: Alfred Becht 社
製造国: ドイツ

*【使用目的又は効果】

研磨用ポイントで主にジルコニアコーピング、ポーセレン、ハイブリッドセラミック、硬質レジン、コンポジットレジンの研磨に用いる。

*【使用方法等】

本材を歯科用マンドリルに装着し、ハンドピース等で回転させながら研磨対象物に使用回転数 7,000rpm 以下で接触させて研磨作業を行います。

【使用上の注意】

- 1) 使用前、使用後に点検を行い、製品及び軸部に汚染、損傷、変形(形状不良)等のあるものは使用しないこと。
- 2) 整備点検された歯科用、及び歯科技工用回転駆動装置の内、回転数を指定回転数以下で安定して使用できるものを回転駆動力とすること。
- 3) 本品をマンドレルに装着し、使用する際にはハンドピースメーカーの指示に従い、シャックを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) マンドレルに負担がかかると変形の原因になりますので過度の加圧での使用は避け、ソフトタッチで使用すること。
- 5) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 6) 万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- 7) 本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
- 8) 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 9) 本材は記載の用途以外には使用しないこと。
- 10) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 11) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからないときは、再読して下さい。なお、この用紙を紛失された場合には表示された販売元又は、ご購入された業者へお申し付け下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
- ・外圧(物理的負荷)及び汚染を避けること。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

- ・本材は受け取り後、六ヶ月以内に使用すること。
- 〔使用期限は、自己認証(当社データ)による。〕