

機械器具 6 5 歯科用充填器  
一般医療機器 クラス I 歯科用ワックス形成器 JMDN:35794000

## スマートワックスデュオ

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 装置外観

スマートワックスデュオ（本体）ACアダプター付



#### <本体仕様>

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 外形寸法      | D130×W150×H50mm   |
| ハンドピースコード | 1.8m              |
| 電源        | 110-230V, 50/60Hz |
| 消費電力      | 12W               |
| 温度コントロール  | 50～220℃           |

### \*【使用目的又は効果】

本機により加熱されたモデリングインスツルメントによりワックス等を溶かし築盛をおこなう。

### \*【使用方法等】

#### <操作方法>

- ① 本体左右にあるハンドピース差込口にハンドピースコードを差し込みます。
- ② ACアダプターのコードを本体左側の差込口に差し込み、コンセント（AC100V）に接続します。
- ③ ハンドピースは左右のON/OFFスイッチ①を押すとそれぞれのスイッチが入り、②マークのLEDが点滅から点灯に変わります。
- ④ ④と⑤のキーを押し、ディスプレイに表示される温度を設定します。
- ⑤ 温まったインスツルメント部分でワックスを溶かして使用します。
- ⑥ 使用を終了する時は、左右それぞれのON/OFFスイッチ①を押し、②マークのLEDが消灯するのを確認する。

#### <モデリングインスツルメントの交換>

- ① コルクハンドルのチップをつかみ、それを引っ張り抜き取ります。
- ② 交換するインスツルメントをコルクハンドルのところで保持し、カチッと音がするまでハンドピースに差し込みます。

### 【使用上の注意】

使用前に取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

- 1) 使用中、インスツルメントは非常に高温になりますので触らないこと。
- 2) 濡れた手で本体に触らないこと。
- 3) 本体に衝撃や力を与えないこと。精密回路が組み込まれているので、トラブルの原因になります。
- 4) モデリングインスツルメントを交換する時は、必ず電源を切っておこなうこと。また、インスツルメントが十分冷めてから交換すること。火傷の原因になります。
- 5) 使用中、高温になっているインスツルメントがコード等に触れない様に注意すること。火災の原因になります。

- 6) 使用後しばらくはインスツルメントが熱いので注意すること。
- 7) コルクハンドルを外すと露出するヒータリングエレメントには触れないこと。火傷の原因になります。
- 8) 傷ついたり裂けた電源コード、プラグ、ゆるいコンセントを使用しないこと。火災や電気ショックを起こす原因になります。
- 9) 電源コードをきつく折り曲げたり、重い物の下に置いて押し潰したりしないこと。機器の故障や火災、電気ショックを起こす原因となります。
- 10) 電気ショックを避ける為に、設置にはアース付きの電源に接続すること。
- 11) 設置の際、本体の下にある換気口を塞がないこと。
- 12) 電源コードの一部を掴んでプラグを引き抜かないこと。又、濡れた手で触らないこと。火災や電気ショックを起こす原因になります。
- 13) 湿度の高い所やほこりや水が飛び散る場所に本体を設置しないこと。
- 14) 設置の際は電源プラグのピンの上や周辺の水やほこり等を取り除き、他の発熱器具等から離して取り付けること。
- 15) 清掃の際は電源プラグを抜いてからおこなうこと。本体に水、化学洗剤等をスプレー等しないこと。火災や電気ショックを起こす原因になります。
- 16) 本体より異音、異臭や煙を感知したら、直ちに使用を止め、電源プラグを抜いてください。
- 17) 本体を分解したり、修理・改造したりしないこと。
- 18) 機器をメーカーで指定されていない方法で使用しないこと、故障の際、保証修理が正しく受けられない場合があります。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### 〔貯蔵・保管方法〕

本品の設置・保管は以下の場所にしないこと。

- ① 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）
- ② 風通りの悪い、ホコリが溜まりやすい場所。
- ③ 本品を長期間使用しない場合は電源プラグを抜き保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 セレック株式会社  
住所 〒543-0011  
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10  
電話番号 06-6765-0691  
FAX番号 06-6765-0690

製造業者 Amann Girsbach GmbH  
製造国 オーストリア