


機械器具65 歯科用充填器  
一般医療機器 クラスI 歯科用ワックス形成器 JMDN:35794000

## アートワクサー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 装置外観

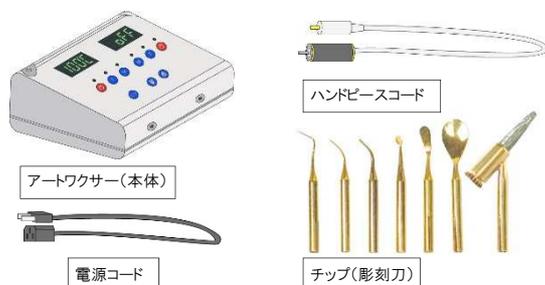

### 【使用目的又は効果】

本機により加熱されたチップ(彫刻刀)によりワックス等を溶かし築盛をおこなう。

### 【使用方法等】

#### <操作方法>

- ① 本体に電源コード及びハンドピースコードを取り付けます。
- ② 使用したいチップ(彫刻刀)をハンドピースの先端に位置に取り付けます。  
(チップには接続の為の切れ目がありますので、そこにハンドピース先端の鍵部を合わせ挿入します。)
- ③ 本体背面の電源スイッチをONにします。
- ④ 使用する側のON/OFFボタンを押すとボタンの上部のランプが点滅し使用状態になります。  
また、ディスプレイに設定温度が表示されチップ部分が、設定温度に温められます。
- ⑤ 温まったチップ部分でワックスを溶かして使用します。
- ⑥ 使用を終了する時は、ON/OFFボタンを押しOFFにしてからハンドピースをクレードルに戻して背面の電源スイッチをOFFにします。

#### <チップの交換>

ON/OFFボタンを押し必ずOFFモードの状態です十分チップ部分が冷めてからチップを引抜き、別のチップを取り付けます。

### 【使用上の注意】

使用前に取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

- 1) 使用中、チップは非常に高温になりますので触らないこと。
- 2) 濡れた手で本体に触らないこと。
- 3) 本体に衝撃や力を与えないこと。精密回路が組み込まれているので、トラブルの原因になります。
- 4) チップ(彫刻刀)を交換する時は、必ず電源を切っておこなってください。また、チップが十分冷めてから交換してください。火傷の原因になります。
- 5) 使用中、高温になっているチップがコード等に触れない様に注意して下さい。火災の原因となります。
- 6) 傷ついたり裂けた電源コード、プラグ、ゆるいコンセントを使用しないこと。火災や電気ショックを起す原因となります。
- 7) 電源コードをきつく折り曲げたり、重い物の下に置いて押し潰したりしないこと。機器の故障や火災、電気ショックを起す原因となります。
- 8) 電気ショックを避ける為、設置にはアース付きの電源に接続すること。
- 9) 設置の際、本体の下にある換気口を塞がないこと。
- 10) 電源コードの一部を掴んでプラグを引き抜かないこと。

又、濡れた手で触らないこと。(火災や電気ショックを起す原因になります。)

- 11) 湿度の高い所やほこりや水が飛び散る場所に本体を設置しないこと。
- 12) 設置の際、本体の近くに発熱器具等から離して取り付けてください。
- 13) 清掃の際、電源プラグを抜いてから製品を清掃してください。本体に水、化学洗剤等をスプレー等しないこと。(火災や電気ショックを起す原因ります。)
- 14) 設置するとき電源プラグのピンの上や周辺の水やほこり等を取り除いて下さい。
- 15) 本体より異音、異臭や煙を感知すれば、直ちに使用を止め、プラグを抜いてください。
- 16) 本体を分解したり、修理・改造したりしないこと。
- 17) 機器をメーカーで指定されていない方法で使用しないこと、故障の際、保障が正しく受けられない場合があります。

### 【保守・点検に係る事項】

本品の設置・保管は以下の場所にしないこと。

- ① 高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所等)
- ② 風通りの悪い、ホコリが溜まりやすい場所。
- ③ 本品を長期使用しない場合は電源プラグを抜き保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	セレック株式会社
住所	〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号	06-6765-0691
FAX番号	06-6765-0690

製造業者	B. K. MedentCo., Ltd.
製造国	大韓民国