


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 クラス I 歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDN:70901000

ストーンポイント

*【形状・構造及び原理等】

- 1) 原材料
作業部: シリコンカーバイド、長石、顔料
軸部: スチール
- 2) 構造
シリコンカーバイドにフェノール、長石、顔料を加え形成した後、1300℃で焼結させたもの。
(フェノールは燃焼し焼失)
- 3) 形状
作業部は寸法、使用目的において多種類ある。

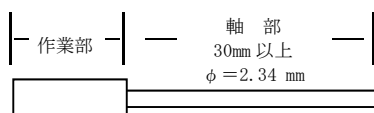

*【使用目的又は効果】

歯科技工用の研削材(ポイント)で、金属、セラミック、ポーセレン等の形成、研磨に使用する。

【使用方法等】

- 1) JIS T5907:2001(歯科用ハンドピース—第2部:ストレート及びギアードアングルハンドピース)または同等の規格を満たしたハンドピースに装着して使用する。
- 2) 本材を回転させ作業部を切削・研磨の対象物に接触させる。

【使用上の注意】

- 1) 回転数: 最高回転数を厳守し、決してそれ以上の回転数で使用しないこと。
最高回転数: 40,000rpm
- 2) 本品を装着する際、事前にハンドピースが正常に作動するか確認して下さい。
- 3) 本品の装着はハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) あらかじめハンドピースを回転させ、異常やブレ等がないことを確認して下さい。
- 5) ねじる、こじる、テコの原理での使用はしないで下さい。
- 6) 突き刺すような使用は避け、強く押し付けるような使用は厳禁。フェザータッチで断続的に使用して下さい。
- 7) 万一の事故の際、眼の損傷を防ぐために保護メガネ等を装着して下さい。
- 8) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからない時は再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された製造販売元、又はご購入された業者へお申し付け下さい。
- 9) 本品は、歯科技工以外には使用しないで下さい。歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

保管方法:
湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避け、家庭用洗剤、超酸化水は使用しないで下さい。
洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用して下さい。
外圧(物理的負荷)及び汚染を避けて下さい。

使用期間:

研削力、研磨力が低下したら速やかに使用を中止して、新規の製品と交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項:

作業部に欠けやヒビが無いかを目視にて確認して下さい。
軸部に曲がりがないか本品を回転させ目視にて確認して下さい。いずれかでも認められた場合には、本品の使用を中止して下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 セレック株式会社
住所 〒543-0011
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号 06-6765-0691
FAX番号 06-6765-0690

製造業者 B.K. Medent Co., Ltd.
製造国 大韓民国