


歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 クラスⅠ 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN:70901000

ストーンポイントピンク

*【形状・構造及び原理等】

- 1) 原材料
作業部：酸化アルミニウム（アルミナ）
軸部：スチール
- 2) 構造
酸化アルミニウムを形成し焼結させたもの。
- 3) 形状
作業部は寸法、使用目的において多種類ある。

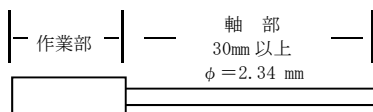

*【使用目的又は効果】

歯科技工用の研削材（ポイント）で、金属等の形成、研磨に使用する。

【使用方法等】

- 1) JIS T5907:2001（歯科用ハンドピース第2部：ストレート及びギアードアングルハンドピース）または同等の規格を満たしたハンドピースに装着して使用する。
- 2) 本材を回転させ作業部を切削・研磨の対象物に接触させる。

【使用上の注意】

- 1) 回転数：最高回転数を厳守し、決してそれ以上の回転数で使用しないこと。
最高回転数：40,000r. p. m.
- 2) 本品を装着する際、事前にハンドピースが正常に作動するか確認して下さい。
- 3) 本品の装着はハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) あらかじめハンドピースを回転させ、異常やブレ等がないことを確認して下さい。
- 5) ねじる、こじる、テコの原理での使用はしないで下さい。
- 6) 突き刺すような使用は避け、強く押し付けるような使用は厳禁。フェザータッチで断続的に使用して下さい。
- 7) 万一の事故の際、眼の損傷を防ぐために保護メガネ等を装着して下さい。
- 8) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからない時は再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された製造販売元、又はご購入された業者へお申し付け下さい。
- 9) 本品は、歯科技工以外には使用しないで下さい。歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法：
湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避け、家庭用洗剤、超酸化水は使用しないで下さい。
洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用して下さい。
外圧（物理的負荷）及び汚染を避けて下さい。

使用期間：
研削力、研磨力が低下したら速やかに使用を中止して、新規の製品と交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項：
作業部に欠けやヒビが無いかを目視にて確認して下さい。
軸部に曲がりがないか本品を回転させ目視にて確認して下さい。いずれかでも認められた場合には、本品の使用を中止して下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	セレック株式会社
住所	〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号	06-6765-0691
FAX番号	06-6765-0690
製造業者	B. K. Medent Co., Ltd.
製造国	大韓民国