

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 クラス I 歯科用マンドレル JMDN:35170000

セレックマンドレルH

*【形状・構造等】

原材料

ステンレス鋼

形状



ヘッド部径 各種類により異なる。
例) H50 : 5.0mm H70 : 7.0mm

軸部径 2.35mm

【使用目的又は効果】

歯科用研削、研磨材のポイントやホイールを取付けハンドピースにセットして使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品を口腔内で使用する際は滅菌する。
- 2) 通法により、本品に研削・研磨材を取り付けます。
取り付ける材料サイズに合わせてヘッド部のネジを奥までねじ込み、材料を固定します。
- 3) 研削・研磨材を取り付けた本品を歯科技工用電気エンジン等のハンドピースに装着し使用します。

【使用上の注意】

- 1) 取り付ける研削・研磨材料の指定する使用回転数を厳守すること。
- 2) 本品を装着する際、事前にハンドピースが正常に作動するか確認して下さい。
- 3) 本品の装着はハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) あらかじめハンドピースを回転させ、異常やブレ等がないことを確認して下さい。
- 5) ねじる、こじる、テコの原理での使用はしないで下さい。
- 6) 突き刺すような使用は避け、強く押し付けるような使用は厳禁。フェザータッチで断続的に使用して下さい。
- 7) 万一の事故の際、眼の損傷を防ぐために保護メガネ等を装着して下さい。
- 8) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからない時は再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された製造販売元、又はご購入された業者へお申し付け下さい。
- 9) 本品は、歯科技工以外には使用しないで下さい。歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法:

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気避け、家庭用洗剤、超酸化水は使用しないで下さい。

洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用して下さい。

外圧(物理的負荷)及び汚染を避けて下さい。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項:

作業部に欠けやヒビが無いかを目視にて確認して下さい。

軸部に曲がりがないか本品を回転させ目視にて確認して下さい。いずれかでも認められた場合には、本品の使用を中止して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: セレック株式会社

住所: 〒543-0011

大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10

電話番号: 06-6765-0691

FAX番号: 06-6765-0690

製造業者: B. K. Medent Co., Ltd.

製造国: 大韓民国