


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 クラス I 歯科技工用スチール切削器具 JMDN70743000
ミリングバー

【形状・構造及び原理等】


パラレルタイプ

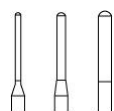

497RD


/012/016/023

コニカルタイプ

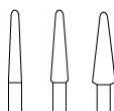

496KR

/023/031/040

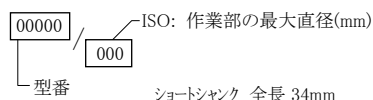**【使用目的又は効果】**

スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース・ミリングマシン等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース・ミリングマシン等に装着し回転させ作業部で研削する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前、使用後に点検を行い、製品及び軸部に汚染、損傷、変形（形状不良）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 推奨使用回転数で使用する。
- 3) 使用する前に予備回転を行ない、振れが無いことを確認すること。
- 4) 本品を使用する際にはハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 5) 過度の加圧での使用はさけ、ソフトタッチで使用する。
- 6) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 7) 本材料及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
- 8) 本材は記載の用途以外には使用しないこと。
- 9) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからないときは再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された販売元又は、ご購入された業者へお申し付け下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 セレック株式会社
住所 〒543-0011
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号 06-6765-0691
FAX 番号 06-6765-0690

製造業者 Hager & Meisinger GmbH
製造国 ドイツ