

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 クラス I 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000


ユニバーサルポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

形状)

9518P

ミディアム

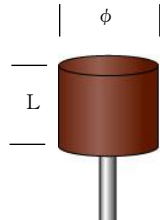

φ : 14.0mm

9518H

エクストラファイン



L : 12.0mm

成分)

作業部：シリコンカーバイド、顔料

軸 部：ステンレス鋼

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

セレック株式会社

住所

〒543-0011

大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10

電話番号

06-6765-0691

FAX 番号

06-6765-0690

製造業者

Hager & Meisinger GmbH

製造国

ドイツ

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材で
歯科技工用ハンドピース・ミリングマシン等に装着し、金属、プ
ラスチック、陶材、又は同種の材料を研磨するために用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース・ミリングマシン等に装着し回転させ
作業部で研磨する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前、使用後に点検を行い、製品及び軸部に汚染、損傷、変形（形状不良）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 推奨使用回転数で使用する。
- 3) 使用する前に予備回転を行ない、振れが無いことを確認すること。
- 4) 本品を使用する際にはハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 5) 過度の加圧での使用は避け、ソフトタッチで使用する。
- 6) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 7) 本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
- 8) 本材は記載の用途以外には使用しないこと。
- 9) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからないときは再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された販売元又は、ご購入された業者へお申し付け下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。

外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。