

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 クラス I 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN:70891000

セレフォーム マルチタイプ

*【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の製作に用いる。

本品は、非常に流動性に優れた複模型用印象材です。

性能：シェアーA硬度 17

*【使用方法等】

- ① キャタリストとベースを 1：1 の割合で練和して下さい。
※ビーカー等を使用して下さい。
※練和時間：45 秒以内（均一な色になれば練和は完了です。）
- ② フラスコより 30～45cm 位の高さからゆっくり流し込みます。
※作業時間：4～6 分（室温 23℃）
※硬化時間：30 分（室温 23℃）

*【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 本品の口腔内での使用はしないで下さい。
- ② 本品と他社品との混用はしないで下さい。
- ③ 本品は以下の材料が接触または、混入しますと硬化が妨げられますので注意して下さい。
 - ・縮重合型シリコーン印象材・チオコールラバー印象材
 - ・ユージノール系材料・未硬化のレジン
 - ・ラテックスグローブ
- ④ キャップを取り間違えないで下さい。容器内で本品が硬化する原因となります。
- ⑤ 本品が衣服に付きますと除去しにくいので注意して下さい。
- ⑥ 室温が高いと硬化時間が早くなりますので、注意して下さい。
- ⑦ 練和の時には、金属製のスパチュラー及び付加重合型シリコーンと反応のある材料は避けて下さい。

2) 重要な基本的注意

- ① 過去にシリコーン印象材に対し、過敏性の既往歴のある人は、本品に触れないで下さい。
- ② 本品使用の際、及び練和途中で皮膚に付着し発疹、皮膚炎などの過敏反応があらわれた場合には使用を中止し医師の判断を受けて下さい。
- ③ 本品が万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗い流し、眼科医の診察を受けて下さい。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、高温多湿や直射日光を避けて、室温（15～25℃）で保管して下さい。

使用前に本品をキャタリスト及びベースそれぞれよく振り混ぜてから使用してください。

使用後は必ずキャップを閉めて保管して下さい。

[有効期間]

本品は、使用期限内にご使用下さい。

使用期限は、容器に記載されています。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	セレック株式会社
住所	〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号	06-6765-0691
FAX 番号	06-6765-0690

製造業者	S&C Polymer GmbH
製造国	ドイツ