

歯科材料 6 歯科用印象材料  
一般医療機器 クラス I 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN:70891000

## セレフォームKパテ キャタリスト

### 【禁忌・禁止】

- ① 過去にシリコーン印象材に対し過敏性の既往歴のある人は本品に触れないで下さい。
- ② 本品使用の際、及び練和途中で皮膚に付着し発疹、皮膚炎などの過敏反応があらわれた場合には使用を中止し医師の判断を受けて下さい。
- ③ 本品が万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗い流し、眼科医の診察を受けて下さい。
- ④ 揮発性があるので本品を直接吸引しないで下さい。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 製造販売業者 | セレック株式会社                          |
| 住所     | 〒543-0011<br>大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10 |
| 電話番号   | 06-6765-0691                      |
| FAX 番号 | 06-6765-0690                      |
| 製造業者   | S&C Polymer GmbH                  |
| 製造国    | ドイツ                               |

### \*【形状・構造及び原理等】

| 形状    | 成分                 |
|-------|--------------------|
| ペースト状 | 有機錫化合物、ケイ酸エステル、その他 |

### \*【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材「セレフォーム Kパテ」の硬化剤として使用し、複模型の製作等、歯科技工に用いる。

### \*【使用方法等】

セレフォーム Kパテ（ベース）

セレフォーム Kパテキャタリスト（キャタリスト）

- ① 計測方法  
ベースを付属の計量スプーンにすり切り 1 杯取り出し、掌で薄く伸ばします。伸ばしたベース材の表面に計量スプーンの面を押し付けて、輪を記します。  
キャタリストをこの輪の直径の長さに合わせて 2 本抽出します。
- ② 練和  
指先でベースを端から中心部へとキャタリストを包み込むようにしっかりと色調が均一になるまで 30 秒間練和します。
- ③ 印象  
しっかりと練和された印象材を直接、印象を採得したい面へ押し当て使用します。  
※作業時間：1 分 30 秒（室温 23℃）  
※硬化時間：6 分（練和開始から 8 分）（室温 23℃）

### 【使用上の注意】

- ① 本品の口腔内での使用はしないで下さい。
- ② 本品と他社品との混用はしないで下さい。
- ③ 室温が高いと硬化時間が早くなりますので、注意して下さい。
- ④ 皮膚が弱い方は、練和時にポリ手袋等を使用すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本品は、高温多湿や直射日光を避けて、室温（15～25℃）で保管して下さい。  
使用後は必ずキャップを閉めて保管して下さい。

〔有効期間〕

本品は、使用期限内にご使用下さい。  
使用期限は、容器に記載されています。