

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 クラス I 歯科用研磨器材 JMDN70907000

セレクトライトバフ

*【形状・構造及び原理等】

構造)



化学繊維を成分とする布による円盤状のバフ

種類	直径	厚さ	推奨回転数 (r. p. m.)	用途
グリーン	25mm	3mm	10,000	中研磨
マルチ	25mm	3mm	7,000～ 10,000	仕上げ研磨
ホワイト	25mm	3mm	10,000～ 16,000	艶出し研磨
ホワイト No. 1	25mm	3mm	10,000～ 16,000	艶出し研磨

【使用目的又は効果】

歯科補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

本材を歯科用マンドレルに取り付け、歯科技工用ハンドピース等に装着し通法により使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前、使用後に点検を行い、製品及び軸部に汚染、損傷、変形（形状不良）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 使用する前に予備回転を行ない、ゆるみや振れが無いことを確認すること。
- 3) 本品を使用する際にはハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) 過度の加圧での使用はさけ、ソフトタッチで使用する。
- 5) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 6) 本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
- 7) 推奨使用回転数で使用する。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 セレック株式会社
住所 〒543-0011
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号 06-6765-0691
FAX 番号 06-6765-0690

製造業者 株式会社日本歯科金属