

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 クラスI 歯科用研磨器材 JMDN70907000
セレックファイバーボールMOJA-CLR

【形状・構造及び原理等】

形状)
作業部 : 直径φ25mm

成分)
作業部 : 不織布、ダイヤモンド粒子

【使用目的又は効果】

ハンドピース等に装着し目的に応じて、それぞれ選択し研磨に使用する。

【使用方法等】

マンドレルに1つまたは複数個を取り付けて歯科技工用ハンドピース等に装着し回転させ作業部で研磨する。
この時、一方向に片寄らず円を描くように動かし研磨する。

推奨する使用方法として、マンドレルH50を使用しMOJA-CLRを2枚セットすると作業部が球状になる為、効率的に使用できます。

【使用上の注意】

- 1) 使用前、使用後に点検を行い、製品及び軸部に汚染、損傷、変形（形状不良）等のあるものは使用しないこと。
推奨使用回転数で使用する。
- 2) 最大回転数：20,000r.p.m. 推奨回転数：10,000r.p.m.
- 3) 使用する前に予備回転を行ない、振れが無いことを確認すること。
- 4) 本品を使用する際にはハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 5) 過度の加圧での使用はさけ、ソフトタッチで使用する。
- 6) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 7) 本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
- 8) 本材は記載の用途以外には使用しないこと。
- 9) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからないときは再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された販売元又は、ご購入された業者へお申し付け下さい。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]
湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 セレック株式会社
住所 〒543-0011
大阪府大阪市天王寺区清水谷町19-10
電話番号 06-6765-0691
FAX番号 06-6765-0690

製造業者 株式会社日本歯科金属