

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

セブライト Z r

【形状・構造及び原理等】

形状：

缶入、固形

成分：

ダイヤモンド粉末、酸化アルミナ、油脂、その他

【使用目的又は効果】

ジルコニア等の補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

研磨

技工用レーズやマイクロモーターにロビンソンブラシやバフ等を装着し回転させて、本製品を少量付着させます。

ジルコニア製補綴物の表面に適度な力で接触させ研磨してください。

洗浄

作業終了後、通法によりスチームクリーナーや超音波洗浄機などで洗い流してください。

【使用上の注意】

- ① 本材が目に入らないように注意すること。目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。
万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流して下さい。
- ② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③ ブラシ、バフ等を使用する場合には、その説明書に記載されている使用上の注意事項を守ること。
- ④ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 高温、多湿、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、室温で保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

有効期間は特に定めないが、外観上変質、効力の低下等があれば使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：セレック株式会社

住 所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町 19-10

電話番号：06-6765-0691