

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 クラスⅠ 歯科用マンドレル JMDN:35170000

セレックマンドレルスクリー

【形状・構造等】

原材料

ステンレス鋼

形状



ネジ部 15mm 固定用ナット 2mm 軸部径 2.35mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

セレック株式会社

住所

〒543-0011

大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10

電話番号

06-6765-0691

FAX 番号

06-6765-0690

製造業者

STODDARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

製造国

英国

【使用目的又は効果】

歯科用研削、研磨材のポイントやホイールを取付けハンドピースにセットして使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品を口腔内で使用する際は滅菌する。
- 2) 通法により、本品に研削・研磨材を取り付けます。
取り付ける材料サイズに合わせてネジ部を奥までねじ込み、固定用ナットにて背面より材料を固定します。
- 3) 研削・研磨材を取り付けた本品を歯科技工用電気エンジン等のハンドピースに装着し使用します。

【使用上の注意】

- 1) 取り付ける研削・研磨材料の指定する使用回転数を厳守すること。
- 2) 本品を装着する際、事前にハンドピースが正常に作動するか確認して下さい。
- 3) 本品の装着はハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを奥まで確実に挿入して正しくチャックを締めて下さい。
- 4) あらかじめハンドピースを回転させ、異常やブレ等がないことを確認して下さい。
- 5) ねじる、こじる、テコの原理での使用はしないで下さい。
- 6) 突き刺すような使用は避け、強く押し付けるような使用は厳禁。フェザータッチで断続的に使用して下さい。
- 7) 万一の事故の際、眼の損傷を防ぐために保護メガネ等を装着して下さい。
- 8) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからない時は再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には表示された製造販売元、又はご購入された業者へお申し付け下さい。
- 9) 本品は、歯科技工以外には使用しないで下さい。歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法：

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気避け、家庭用洗剤、超酸化水は使用しないで下さい。

洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用して下さい。

外圧（物理的負荷）及び汚染を避けて下さい。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項：

作業部に欠けやヒビが無いかを目視にて確認して下さい。

軸部に曲がりがないか本品を回転させ目視にて確認して下さい。いずれかでも認められた場合には、本品の使用を中止して下さい。