

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000
センシン バイトブロック

再使用禁止

【警告】


- 性能、目的に合った使用をすること。性能、使用目的以外での使用は破損、欠損の原因になります。
- 包装に破れ、水濡れがある時は使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

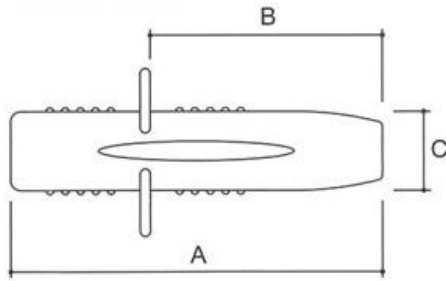

上面図

サイズ	A	B	C
小	54.3 mm	33.9 mm	11.96 mm
中	69.2 mm	41.7 mm	12.90 mm
大	72.9 mm	45.3 mm	15.73 mm

2. 原材料

ポリエチレン

3. 原理

筒の形状をしたブロック体で硬度に富んでおり、上下顎切歯間に挿入することで開口を維持する。

挿管チューブの咬み防止を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、気管挿管、人工呼吸管理中の患者が気管チューブを嚙んでチューブを閉塞させてしまわないように隙間を維持するために用いる器具である。

遠位端は丸く、挿入して開孔するときに開口部を拡張することができる。検査又は他の器具の挿入時に用いる。本品は、プラスチック製の単回使用のものである。

【使用方法等】

- 滅菌包装に破れ等ないことを確認する。
- 滅菌包装を開封し製品を取り出す。
- 院内のプロトコール（使用手順、基準）及び専門の医師に従い挿管チューブを挿入し、バイトブロックを固定する。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - 歯がもろく、本品を咬むことにより損傷が生じる可能性がみられる場合には使用しないこと。
- 重要な基本的注意
 - 必ず本品の滅菌袋に記載されている有効期限を確認し、有効期限の過ぎたものは使用しないこと。
 - 常に適切な歯の位置にあるか注意すること。
 - 定期的な観察を実施し表面材質などに損傷がみられる場合には直ちに新しいものと交換すること。
 - 適切なサイズを選択して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管の条件
 - 高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管して下さい。
- 使用期限
 - 包装箱に記載（自己認証（当社データ）による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

センシンメディカル株式会社

製造業者

メディック トレード
(Medic Trade Co., Ltd.)
国名：台湾

お問合せ先

センシンメディカル株式会社
電話番号：03-5802-0560