

医療用品 05 副木
 一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000
高性能頸椎固定システム
(ネックスプリント プラス MG)


再使用禁止

【禁忌・禁止】
 再使用禁止

【形状・構造および原理等】


<形状及び構造>

- (1) 高性能頸椎固定システム
 ・ネックスプリント プラス
 ・ネックスプリント プラス MG

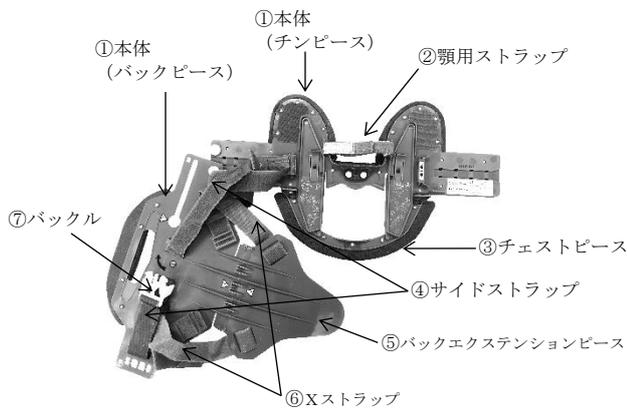

(2) 付属品

※型式により下記の物が同梱される場合がある。

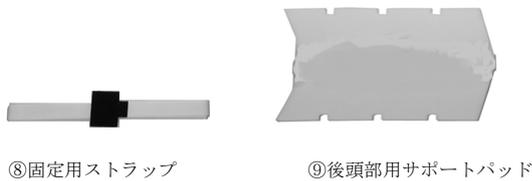

<原材料>

番号	名称	原材料名
①	本体	ポリプロピレン
②	顎用ストラップ	ナイロン
③	チェストピース	ポリプロピレン
④	サイドストラップ	ナイロン
⑤	バックエクステンションピース	ポリプロピレン
⑥	Xストラップ	ナイロン
⑦	バックル	ポリオキシメチレン
⑧	固定用ストラップ	ナイロン
⑨	後頭部用サポートパッド	発泡ポリエチレン

<原理>

本品は救急時における頸椎損傷を伴う患者や傷病者の頸部を固定するものである。

【使用目的又は効果】

本品は、身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】


1. 使用前の準備

包装袋より取出し、各パーツの欠損、傷、ストラップ、可動部分に不備等がないか確認する。

2. ネックスプリント プラス/


ネックスプリント プラス MG の使用方法

- ① バックピースを時計回りに180°回転させる。

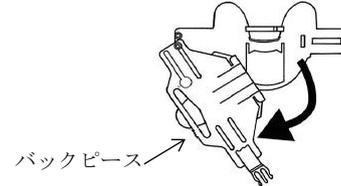

- ② 上部のワッシャを②に嵌め込む、本体を左右に引き伸ばす。

バックエクステンションピースを広げて固定する。

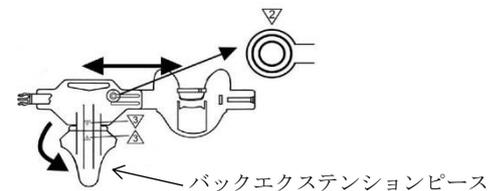


- ③ 顎用ストラップを顎の正面に置き、前面部と後面部を傷病者の首に巻いて連結させる。




- ④ 本体を持ち、両側のサイドストラップを締め付ける。



- ⑤ チンピースを保持しながら、チェストピースを鎖骨と同一線上に並ぶまで引き伸ばし、固定する。

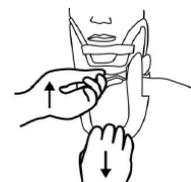

- ⑥ Xストラップ(青、黄)を顎の下で交差させ、本体頬付近にある同色のベルクロに接着する。
-
- 注意: 2本のストラップはガイドを通す。

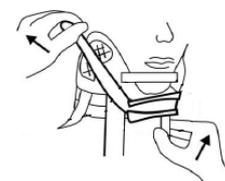


取扱説明書を必ずご参照下さい


3. 頭部固定システム (HRS) の使用方法

- ① 頭部の下に矢印型の後頭部用サポートパッドを滑り込ませる。


注意：透明フィルム側を下にする。

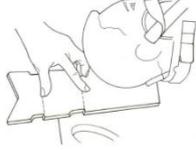

- ② 頭部が適切な高さになるように、必要に応じ後頭部用サポートパッドを切り取り、調整する。

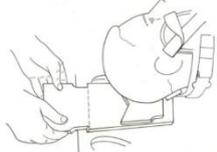


- ③ 透明フィルムを引っ張り、バックボードに後頭部用サポートパッドを貼り付け固定する。

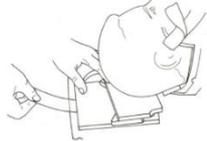

- ④ 一旦Xストラップを外して、固定用ストラップの四角い部分を本体頬付にあるベルクロに貼り付けた、その上から再度Xストラップを貼り付ける。



- ⑤ 固定用ストラップをバックボードに固定する。過度な締付ないように注意する。

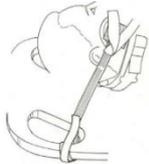

- ⑥ ステップ④、⑤を繰り返し、反対側の固定用ストラップを取り付ける。



【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

高温を避け、乾燥、清潔、塵やほこりのない環境下で保管すること。

<有効期間>

製造日より3年（自己認証による）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】 センシンメディカル株式会社

【製造元】 トン クワン プロモーティブ エレクトロニクス
Dong Guan Promotive Electronics Co., Ltd.
中華人民共和国

【お問合せ先】 センシンメディカル株式会社
TEL 03-5802-0560