

医療用品 05 副木
一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000

高機能頸椎固定システム (ニューネックスプリント プラス、ニューネックスプリント プラス MG)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造および原理等】


<形状及び構造>

(1) 高機能頸椎固定システム

・ニューX カラー プラス

・ニューネックスプリント プラス

*・ニューネックスプリント プラス MG

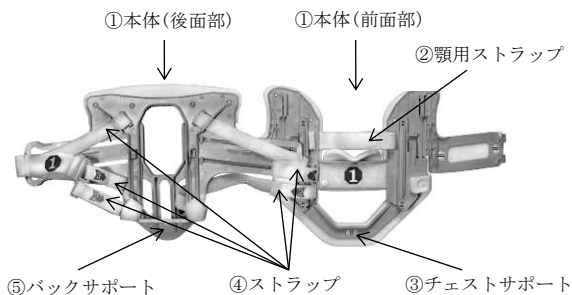

(2) 付属品



*⑧気管チューブホルダー

※ニューネックスプリント プラス MG のみ同梱されます。

*<原材料>

番号	名称	原材料名
①	本体	ポリプロピレン
②	顎用ストラップ	ナイロン
③	チェストサポート	ポリプロピレン
④	ストラップ	ナイロン
⑤	バックサポート	ポリプロピレン
⑥	固定用ストラップ	ナイロン
⑦	後頭部用サポートパッド	発泡ポリエチレン
⑧	気管チューブホルダー	ポリプロピレン

<原理>

本品は救急時における頸椎損傷を伴う患者や傷病者の頸部を固定するものである。

【使用目的又は効果】

本品は、身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前の準備


包装袋より取出し、各パーツの欠損、傷、ストラップ、可動部分に不備等がないか確認する。

* 2. ニューX カラー プラス/

ニューネックスプリント プラス/

ニューネックスプリント プラス MG の使用方法


① 本体を横に広げ、バックサポートを下げる。

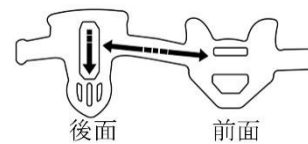

② 前面部と後面部を確認の上、連結する。




③ チェストサポートのパッドを鎖骨と同一線上に合わせる。

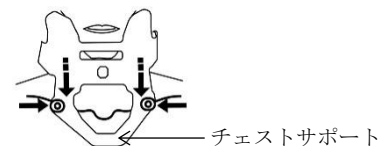

④ ①の上にストラップ1を装着する。



⑤ ①の部分を保持しながら、ストラップ2と3を左右にしっかりと締める。

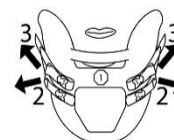

⑥ 重篤な患者には固定ストラップを追加装着する。

注意：追加固定した場合は、バックボードに固定できません。




3. 頭部固定システム (HRS) の使用方法


① 頭部の下に矢印型の後頭部用サポートパッドを滑り込ませ

取扱説明書を必ずご参照下さい


る。

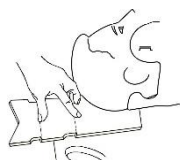

- ② 頭部が適切な高さになるように、必要に応じ後頭部用サポートパッドを切り取り、調整する。

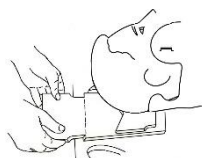

- ③ 透明フィルムを引っ張り、バックボードに後頭部用サポートパッドを貼り付ける。

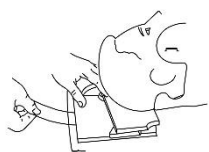

- ④ 固定用ストラップをバックボードに結びつける。締め付け過ぎないように注意する




- ⑤ 同様に反対側も固定する。



* 4. 気管チューブホルダーの使用方法

- ① 本体のガイドに固定用ストラップを通し、チューブホルダーを所定の位置に固定する。

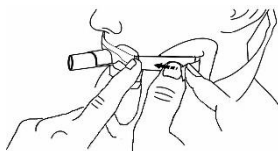

- ② チューブホルダーに気管チューブを固定するために、粘着テープを使用する。



【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

高温を避け、乾燥、清潔、塵やほこりのない環境下で保管すること。

<有効期間>

製造日より3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕 センシンメディカル株式会社

〔製造元〕 トン クワン プロモーティブ エレクトロニクス
Dong Guan Promotive Electronics Co., Ltd.
中華人民共和国

〔お問合せ先〕 センシンメディカル株式会社
TEL 03-5802-0560