

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

FMT3mm ワニロクリップ


【禁忌・禁止】

併用医療機器 [相互作用の項参照]

MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となる恐れがあるので使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

製品外観

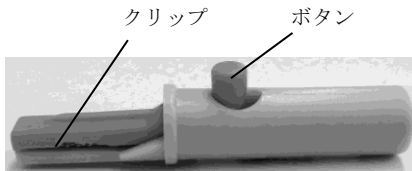

動作原理

本品は心電計等の 3mm プラグケーブルと ECG タブ電極を接続するアダプタです。本品は ECG タブ電極から導出した生体信号を心電計等に伝達します。

【使用目的又は効果】

患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置です。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付けます。

【使用方法等】

- ① 本品に心電図リード線の 3mm バナナプラグを差し込みます。
- ② 本品のボタンを押しながらクリップを開き、心電図電極のタブ部分を挟みます。
- ③ 心電図の測定終了後は本品を電極から取り外します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品に 3mm プラグ以外の心電計ケーブルを接続しないでください。
- 必ずボタンを押しながら電極と接続してください。
- 測定終了後はボタンを押しながら電極を取り外してください。
- 本品を水や消毒剤等につけないでください。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
核磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	誘導起電力による発熱で患者が熱傷を負うことがある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：

保管温度：0℃～50℃

相対湿度：20～80%

耐用期間：

本品は消耗品です。クリップの金属部に腐食が見られたり、電極の接続が緩くなっている場合は新品と交換してください。

【保守・点検に係わる事項】

＜清拭・消毒の方法＞

1. 消毒を行う前には必ず心電計等のケーブルから本品を取り外してください。
2. 中性洗剤、または消毒用アルコールを湿らせたやわらかい布で本品を拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社センステック

TEL 04-7128-6023

製造業者・国名：

Metko Medikal ve Tibbi Cihazlar Dis Ticaret Sanayi A.S.・Turkey

メトコ メディカル ヴェ トゥッビイジハズウル ディシユ

ティジャーレット サナイ エイエス・トルコ