

再使用禁止


鍼

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 刺入の深さは、鍼長の 1/3 以上残して刺入してください。
No.01(φ0.14mm)以下の鍼を使用する場合は、鍼長の 1/2 以上残して刺入してください。
- 原則禁忌
 次の患者には適用しないことを原則とするが、特に必要な場合には慎重に適用すること。
 妊婦、救急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、出血性疾患、ステンレス成分に対する金属アレルギーのある患者

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

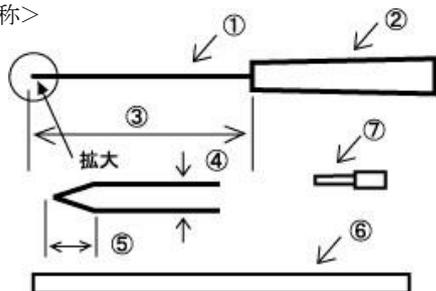

①	鍼体 (ステンレス鋼線)	④	線径
		⑤	鍼尖
②	鍼柄	⑥	鍼管
③	鍼長	⑦	ストッパー

線径 (φ mm)	呼称	鍼長(mm)							
		7	10	15	30	39	48	60	
0.10				○*					
0.12	00 番	○	○	○*	○				
0.14	0 番	○	○	○	○	○	○		
0.16	1 番	○	○	○	○	○	○	○	
0.18	2 番			○	○	○	○	○	
0.20	3 番			○	○	○	○	○	
0.22	4 番				○	○	○	○	
0.24	5 番				○	○	○	○	
0.30	8 番							○	

※ タイプによって上記の○印の製品がないものもある

※ シリコン油コーティングしていないタイプも有*

<原理>

本品は疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため末梢神経を刺激する細長く先の尖った滅菌済み毫鍼であって、JIS T 9301 に適合するものである。

【使用目的又は効果】*

鍼灸治療に使用すること。

【使用方法等】*

- 滅菌済みにつき、包装開封後直ちに 1 回限り使用する。
 - 1) 刺入部位の皮膚を消毒する。
 - 2) ブリスター包装を開封し、鍼を取り出す。(鍼管付のものは、鍼管と鍼柄の接合部分を分離し、鍼を鍼管から取り出さずに刺入部位に鍼管を当てる)
 - 3) 鍼を刺入し刺激を与える。(鍼管付のものは、鍼管からのぞいている鍼柄を軽くたたいて切皮し、鍼管をはずした後、鍼を刺入する)

【使用上の注意】

<重要な基本的事項>

- 個別包装により、無菌が保たれています。包装がすでに破損または汚損していた場合は、使用しないでください。
- ご使用前に、鍼を点検してください。湾曲や損傷のある場合には使用しないでください。
- 鍼を刺入する部位はアルコール綿等でよく清拭し、刺入してください。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。
- 筋肉部への治療では、極度の筋硬直により、折鍼の危険があります。φ0.18mm 以上の太い鍼をご使用ください。患者様の緊張を取り除き、咳などにも注意しながら施術してください。
- 刺入した鍼が抜けなくなった時は、無理に抜かず、筋を弛緩させるなどの処置を行い、ゆっくりと真直ぐに抜いてください。抜鍼時に鍼を曲げたり、ヒネリなどの力をかけたまま引き抜くと折鍼の危険があります。
- 灸頭鍼には金属鍼柄をお使いください。また、施灸に当たっては局所の火傷の防止に注意してください。
- 灸頭鍼を行う時は、鍼体に炎をあてないでください。鍼体が曲がる場合があります。
- 鍼体はステンレス鋼線で作られています。特にニッケル、クロム等のステンレス成分に対する金属アレルギーのある患者様に対しては使用しないでください。
- 使用は 1 回限りとし再使用、再滅菌はしないでください

【保管方法及び有効期間等】*

<保管方法>

- 水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。

<製造番号又は製造記号/有効期間>

- 外箱に記載 (使用期限は自己認証による)

【包装】

100 本/箱 もしくは 240 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：セラビ株式会社

住所：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎 2-2-1

電話番号：06-6312-1077

製造業者：WujiangCityCloud&DragonMedicalDeviceCo.,Ltd

輸入元：中国