

2010 年 7 月 20 日作成（新様式第 1 版）

2016 年 5 月改訂

*2021 年 5 月改訂

機械器具 6 5
歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 JMDN70680000

NEW CR 賦形充填器

【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】



種 類：CR-1
CR-2

【原材料】

作業部：ステンレス製（DLCコーティング）

把柄部：シリコンゴム製

【使用目的又は効果】

各種歯科用形成充填材等を窩洞内に輸送、圧接形成、彫刻形成に使用する器具である。

【使用方法等】

本品は、各種歯科用形成充填材を窩洞内に輸送し圧接形成、彫刻形成、並びに歯科材料・歯科用医薬品等の充填、塗布に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

○使用前に洗浄・滅菌してから使用すること。

○本品は患者毎に取り換えて使用すること。

【使用上の注意】

- ①使用目的以外は使用しないこと。
- ②使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。破損・曲がり等の原因になります。
- ③使用後は、器具に付着している材料、薬剤等が乾燥しないうちに直ちに拭き取ること。
- ④洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄するときには、洗浄物同士が接触して刃先を破損することがないように注意すること。
- ⑤金属たわし、クレンザー（磨き粉）などは器具の表面を損傷するので汚れ除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑥本品は、各種先端部に DLC コーティング加工を施してあります。レジン充填硬化後は本品でレジン面を擦り付ける様な圧接をしないこと。DLC コーティングが剥がれます。
- ⑦金属疲労などで破損の恐れがあるため、長期間使用しないこと。
- ⑧アレルギーが認められる方には使用しないこと。
- ⑨本品は、患者毎に取り替えて使用すること。
- ⑩本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- 本品は、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びる恐れがありますので、湿度が低く清潔な場所に保管すること。
- 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐ為に清潔な場所で適切に保管・管理すること。

〔有効期間等〕

本品は使用有効期限を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することがあるため適宜新しい物と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用（滅菌）前・使用後に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか点検すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【包 装】

各種 1 本入包装

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：(株)背戸製作所
住 所：〒300-4223
茨城県つくば小田 4596-1
電 話 番 号：029-867-0376
F A X 番 号：029-867-0439
製 造 業 者：(株)背戸製作所

【販売業者の氏名又は名称等】

販 売 業 者：(株)日本歯科工業社
住 所：〒110-8530
東京都台東区上野 5-12-8
電 話 番 号：03-3836-2191
F A X 番 号：03-3836-2199