


機械器具 42  
医療用剥離子  
一般医療機器 歯科起子及び剥離子 JMDN70683000

## インレーリムーバー用ポイント

### 【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等を行わないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

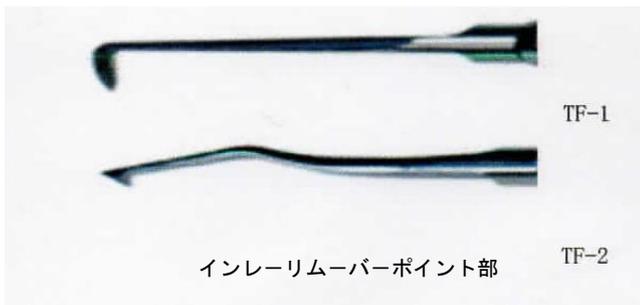

【種類】TF-1  
TF-2

### 【原材料】

作業部：ステンレス製

### 【使用目的又は効果】

歯科治療での患者の口腔内の金冠除去・補綴物除去に使用する器具である。

### 【使用方法等】

本品は、金冠除去器等に金冠除去ポイントを取付け口腔内の金冠除去・補綴物除去に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 患者ごとに取り替えて使用すること。
- 金冠除去器取付け後、緩み等がないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

- ①使用目的以外は使用しないこと。
- ②使用前に必ず、洗浄・滅菌【保守・点検に係わる事項】を参照すること。  
(オートクレーブは115～118℃で30分、121～124℃で15分、126～132℃で10分のいずれかの条件で行ってください。ケミクレーブ、EOG及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用してください。)
- ③破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の応力を加えないこと。
- ④洗浄後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに拭き取り洗浄液等に浸漬すること。
- ⑤洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄するときには、洗浄物同士が接触して破損することがないように注意すること。
- ⑥金属たわし、クレンザー(磨き粉)などは器具の表面を損傷するので汚物除去及び洗浄時の使用しないこと。
- ⑦アレルギーが認められる方には使用しないこと。

- ⑧本品は、患者毎に取り換えて使用すること。
- ⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- 本品は、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びる恐れがありますので湿度が低く清潔な場所に保管すること。
- 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に適切な保管・管理する。

【有効期間等】

本品は使用有効期限を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下することが有るため適時新しい物と交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用(滅菌)前・使用後に破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか点検すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【包装】

- 各種1個入包装(ポイント部のみ)
- 2個入包装(TF-1/TF-2)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 背戸製作所  
住 所：〒300-4223  
茨城県つくば市小田 4596-1  
電 話 番 号：029-867-0376  
F A X：029-867-0439  
製 造 業 者：株式会社 背戸製作所

### 【販売業者の氏名又は名称及び住所等】

販 売 業 者：株式会社 日本歯科工業社  
住 所：〒110-8530  
東京都台東区上野 5-12-8.  
電 話 番 号：03-3836-2191  
F A X 番 号：03-3836-2199