

機械器具 42
医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDN70683000

M I P S 剥離子

【禁忌・禁止】

破折・破損等の原因になるため、改造等は行わないこと。



【形状・構造及び原理等】

種類：M I P S 1
M I P S 2-S
M I P S 2-L
M I P S 3
M I P S 4

【原材料】

作業部：ステンレス鋼製
把柄部：ステンレス鋼製

【使用目的、効能又は効果】

口腔内手術で歯肉溝内、歯周ポケット内、粘膜、骨膜等の軟組織の剥離等に用いる器具である。また、歯根破折やパーフォレーション等の診査等に用いる器具である。

【使用方法等】

本品は、口腔内手術において、尖頭部形態を使用する事により、粘膜等の剥離に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

○使用前に洗浄・滅菌してから使用すること。

○本品は患者毎に取り換えて使用すること。

【使用上の注意】

- ①本品は、歯科口腔外科手術補助器具・剥離子です。
直接火炎にさらさないこと。硬度が低下することがあります。
- ②使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。破損・曲がり等の原因になります。
- ③使用後は、器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ④本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。サビの発生・破折・性能・品質等の低下となります。
- ⑤本品はステンレス製です。一般歯科用の消毒は可能です。ただし、長時間薬液・水中に浸漬させないこと。尚、オートクレーブ・ケミクレーブの使用は可能です。
(オートクレーブ滅菌は 115℃で 30 分、121℃で 15 分、132℃で 10 分のいずれかの条件で行うこと。ケミクレーブ、EOG 及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用すること。)
また、次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れがありますので使用しないこと。超酸性水・次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・ポピドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアンミン酸等。

⑥強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を変色・腐食させる恐れがありますので使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー（磨き粉等）は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

⑦金属疲労などで破損の恐れがあるため、長期間使用しないこと。

⑧アレルギーが認められる方には使用しないこと。

⑨本品は、患者毎に取り替えて使用すること。

⑩本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

○水分・汚れが付着したまま保管しないこと。

○本品は、湿度の高い場所に長時間放置すると錆びる恐れがあるので、湿度が低く清潔な場所に保管すること。

○滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所で適切に保管・管理すること。

【有効期間等】

本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

使用（滅菌）前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

1 本入包装

5 本組包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 背戸製作所

住 所：〒300-4223

茨城県つくば市小田 4596-1

電 話 番 号：029-867-0376

F A X 番 号：029-867-0439